

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Công ty TNHH TMDV Thạch phát
44 Nguyễn Văn Giai, P. Đa káo, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 04 tháng 06 năm 2018

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt																					
1	Mô tả chung loại trang thiết bị y tế																						
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<p>Kìm vuốt dây túi máu Manual tube stripper Model: TS 02, TS 03 Hãng, nước sản xuất: LMB Technologie GmbH, Germany</p> <p>Tính năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Được làm từ hợp kim nhôm chất lượng cao. - Chống gỉ, nhẹ và cứng cáp. - Dễ dàng lau chùi bằng cách lau bằng khăn hoặc thấm nước trong IPA. - Được thiết kế đúng kỹ thuật để dễ dàng cầm, nắm và vuốt. - Giảm bớt sự mệt mỏi trong quá trình sử dụng lâu dài. - Tự điều chỉnh con lăn vào đúng trung tâm để giữ ống vào đúng vị trí. - Kéo trơn tru giúp cho sự vuốt ống máu trở nên hiệu quả. - Có chốt bên trong để giữ cho kim luôn trong trạng thái mở. - Giảm thiểu tối đa sự tắc nghẽn trong ống dẫn. <p>Thông số kỹ thuật:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Model</th> <th>TS 02</th> <th>TS 03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vật liệu chính</td> <td colspan="2">Hợp kim nhôm và thép không gỉ</td> </tr> <tr> <td>Con lăn</td> <td colspan="2">Thép tổng hợp đặc biệt, không gỉ</td> </tr> <tr> <td>Phần cắt</td> <td>Không có</td> <td>Thép chống gỉ</td> </tr> <tr> <td>Tính năng</td> <td colspan="2">Con lăn tự động định tâm</td> </tr> <tr> <td>Lưỡi cắt</td> <td>Không</td> <td>Có</td> </tr> <tr> <td>Khối lượng (g) ± 5%</td> <td>68</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>	Model	TS 02	TS 03	Vật liệu chính	Hợp kim nhôm và thép không gỉ		Con lăn	Thép tổng hợp đặc biệt, không gỉ		Phần cắt	Không có	Thép chống gỉ	Tính năng	Con lăn tự động định tâm		Lưỡi cắt	Không	Có	Khối lượng (g) ± 5%	68	70
Model	TS 02	TS 03																					
Vật liệu chính	Hợp kim nhôm và thép không gỉ																						
Con lăn	Thép tổng hợp đặc biệt, không gỉ																						
Phần cắt	Không có	Thép chống gỉ																					
Tính năng	Con lăn tự động định tâm																						
Lưỡi cắt	Không	Có																					
Khối lượng (g) ± 5%	68	70																					
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện (kể cả hóa chất đi kèm)																						
1.3	Mục đích/chỉ định sử dụng như ghi trên nhãn	<i>Kìm vuốt bằng tay được thiết kế đặc biệt để vuốt, ép và cắt ống túi máu để chuẩn bị cho quá trình phân loại máu từ nơi thu gom máu và được dùng trong suốt quá trình xử lý.</i>																					
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<ol style="list-style-type: none"> Giữ chặt tay kim và mở miệng kim để đặt ống máu vào giữa hai con lăn. Đóng miệng kim cho đến khi đủ áp lực để tác động lên ống máu. Đẩy tay kim lên phía trước trong khi giữ phần cuối của ống máu phía sau con lăn bằng tay khác. 																					



		4. Lắp lại chuyển động cho đến khi máu trong ống được đẩy hết về phía trước vào trong thiết bị thu thập và trộn đều với thuốc chống đông máu.
1.5	Chống chỉ định	- Sử dụng kim không đúng mục đích sẽ gây hỏng hàm và con lăn của kim.
1.6	Cảnh báo và thận trọng	- Không sử dụng khi các con lăn bị lệch hướng hoặc phải đối diện với lực cản cao bất thường trong quá trình vận hành
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	- Kim có thể gây vỡ ống máu khi hoạt động nếu hàm và con lăn của kim bị hỏng mà không được kiểm tra.
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	

Đơn vị nhập khẩu



Le Kim Van Anh
GIÁM ĐỐC
LÊ KIM VĂN ANH

