




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MANUAL TUBE STRIPPER

TS 02, TS 03



Công ty TNHH TMDV Thạch Phát
44 Nguyễn Văn Giai, P.Đakao, Quận 1,
Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tell: 84-8-38208862
Fax: 84 8 38223401

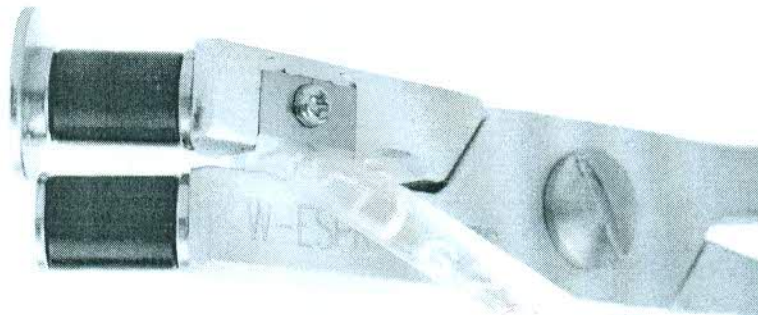



Hướng dẫn sử dụng

- (1) Giữ chặt tay kim và mở miệng kim để đặt ống máu vào giữa hai con lăn.
- (2) Đóng miệng kim cho đến khi đủ áp lực để tác động lên ống máu.
- (3) Đẩy tay kim lên phía trước trong khi giữ phần cuối của ống máu phía sau con lăn bằng tay khác.
- (4) Lặp lại chuyển động cho đến khi máu trong ống được đẩy hết về phía trước vào trong thiết bị thu thập và trộn đều với thuốc chống đông máu.

Bảo dưỡng

- (1) Vệ sinh kim với IPA sau mỗi lần sử dụng.
- (2) Bảo quản trong điều kiện mát mẻ và khô ráo.

Cẩn trọng

- (1) Sử dụng kim không đúng mục đích sẽ gây hỏng hãm và con lăn của kim.
- (2) Không sử dụng khi các con lăn bị lệch hướng hoặc phải đối diện với lực cản cao bất thường trong quá trình vận hành.
- (3) Kiểm tra hãm và con lăn của kim có bị hỏng hay không vì chúng có thể gây vỡ ống máu khi hoạt động.

Thông số kỹ thuật

Model	TS 02	TS 03
Vật liệu chính	Hợp kim nhôm và thép chống gỉ	
Con lăn	Thép tổng hợp đặc biệt, không rỉ	
Phần cắt	Không có	Thép chống rỉ
Tính năng	Con lăn tự động định tâm	
Lưỡi cắt	Không	Có
Cân nặng (g) +/- 5%	68	70