

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hệ thống báo gọi y tá 10 kênh

Hãng sản xuất : Carecom Co., Ltd

Xuất xứ : Nhật Bản

I. Cấu hình

STT	Tên trang thiết bị	Chủng loại
	Hệ thống báo gọi y tá (10 kênh) và các phụ kiện tiêu chuẩn	
1	Tổng đài 10 kênh	BCRC-10AE, BCAC-00WZE, ICRC-10E, ICRP-10E
2	Đèn báo	BCL-673UE/8, BCL-673UE/ 8-W, BCL-673UE-W/ICRP, BCAL-673UE/15-A
3	Đơn vị điều khiển	BCAM-002WZE
4	Đơn vị phòng bệnh nhân	BCAX-404WZCE, BCAX-106WZCE
5	Mặt ốp nhựa	WN6003W, WN6009W
6	Nút gọi	BCA-304RUE, BCB-107RUE, BCA-303RUE; BCAA-303WZE, BCAT-314ZRE, BCAT-312ZRE, RCB-822, BCAF-122WZE; BCAA-304WZE; BCAB-101E, BCB-107RUE, BCAB-401E, BCAB-402E, BCAB-403E, RCB-750A, RCB-760A, RCB-770E, RCB-780E, RCS-102
7	Nút Reset	BCR-302AE; BCAR-303ZAE
8	Màn hình LED 2 mặt	BCRD-05E, BCAD-05E
9	Cáp kết nối thiết bị y tế	BCAB-2P, BCAB-301E-A, BCB-301E-A
10	Phần mềm thống kê cuộc gọi	CCNE-01CR, CCNE-02CR

II. Mục đích sử dụng

Hệ thống báo gọi y tá giúp hiện thị cuộc gọi bình thường hoặc khẩn cấp từ phòng bệnh đến tổng đài. Đồng thời thiết bị có thể thực hiện cuộc gọi khi cần thiết, hiển thị các thông tin về bệnh nhân, khu vực, nhóm y tá qua đó giúp bác sĩ, nhân viên xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp và chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.

III. Hướng dẫn sử dụng

- Khi đèn bật sáng hoặc nhấp nháy tại vị trí hiển thị phong bệnh trên thân tổng đài BCRC-10AE, BCAC-00WZE, ICRC-10E, ICRP-10E cho biết phòng bệnh nơi có cuộc gọi. Ấn nút khi cần gọi bệnh nhân. Có thể gọi 1 hoặc nhiều bệnh nhân khi cần. Các cuộc gọi đến có thể phân loại bằng màu sắc (đỏ, vàng, trắng) và các loại chuông khác nhau để chỉ mức độ bình thường đến khẩn cấp. Tay cầm của tổng đài là nơi để đàm thoại.

Phía bên trái là khu vực cài đặt tổng đài với các chức năng: cài đèn hiển thị, cài đặt âm lượng, các loại chuông báo, cài đặt lựa chọn, nút reset/ tắt chuông,...

	Tổng đài		Đèn báo gọi hành lang		Màn hình hiển thị hành lang
	Nút chọn kênh	Chuông báo	1 màu	2 màu	
Cuộc gọi thông thường	Đèn sáng	Nhạc chuông thông thường	Đèn đỏ được bật	Đèn màu xanh được bật	Màn hình hiển thị bật sáng
Cuộc gọi khẩn	Đèn nhấp nháy liên tục	Chuông báo khẩn Cấp	Đèn đỏ được bật	Đèn đỏ được bật	Màn hình hiển thị nhấp nháy.

- Tổng đài có thể đàm thoại với trạm bệnh nhân BCA-304RUE, BCB-107RUE. Các trạm bệnh nhân có . Loa: Để phát tiếng của điều dưỡng và âm báo trước cuộc gọi, Đèn xác nhận cuộc gọi: Đèn đỏ bật khi nút gọi được ấn, Nút gọi: Dừng khi gọi điều dưỡng , Micro: Dừng khi đàm thoại với điều dưỡng viên. Mặt ốp WN6009W dùng cho trạm bệnh nhân.
- Khi bệnh nhân gọi từ giường bệnh (cuộc gọi thông thường) hoặc từ nhà vệ sinh/ phong tắm (cuộc gọi khẩn), đèn báo hành lang BCL-673UE/8, BCL-673UE/ 8-W sẽ bật. Mặt ốp WN6003W dùng cho đèn báo hành lang.
- Tổng đài có thể đàm thoại với trạm nhân viên BCA-303RUE; BCAA-303WZE. Trạm nhân viên có: Loa: Để phát tiếng của điều dưỡng và âm báo trước cuộc gọi; Đèn xác nhận cuộc gọi: Đèn đỏ bật khi nút gọi được ấn; Nút gọi: Dừng khi gọi điều dưỡng ; Micro: Dừng khi đàm thoại với điều dưỡng viên khác.
- Màn hình LED 2 mặt BCRD-05E, BCAD-05E Hiển thị số phòng bệnh nhân nơi có cuộc gọi
- Ấn nút Reset BCR-302AE; BCAR-303ZAE khi cài đặt lại 1 cuộc gọi từ bệnh nhân
- Nút gọi kéo dài giường bệnh: RCB-822 có Dây; Tay cầm thiết bị; Nút gọi: Ấn khi muốn gọi điều dưỡng viên; Chốt kết nối: giắc cắm vào trạm bệnh nhân.

- Trạm phòng vệ sinh: BCAT-314ZRE, BCAT-312ZRE có: Đèn xác nhận cuộc gọi: Bật đỏ khi nút gọi được ấn hoặc khi kéo dây gọi; Nút gọi: Ấn để gọi điều dưỡng viên; Dây; Chuôi: Kéo chuôi này khi muốn gọi điều dưỡng viên
- Các nút gọi ở đầu giường bệnh BCAF-122WZE; BCAA-304WZE; BCAB-101E có loa để đàm thoại với điều dưỡng, có nút gọi thông báo khi cần hỗ trợ, có nút reset ở phía dưới để tắt thông báo sau khi điều dưỡng/bác sĩ đi.
- Các nút gọi BCAA-601WZE, BCAB-826WZE chỉ có bộ phận báo đến tổng đài và nút reset phía dưới để tắt thông báo.
- Cáp kết nối thiết bị y tế BCAB-2P có thể kết nối được Máy theo dõi bệnh nhân, Bơm tiêm điện vào hệ thống báo gọi. Khi có hiện tượng bất thường thì sẽ thông báo đến tổng đài cho điều dưỡng trực biết.
- Cáp kết nối kép BCAB-301E-A, BCB-301E-A có thể kết nối 2 nút gọi kéo dài đầu giường vào một tấm thiết bị thông báo.
- Nút gọi chạm nhẹ RCB-750A có cảm biến chạm, có đèn báo sáng ban đêm. Khi bệnh nhân không thể nói hoặc di chuyển, chỉ cần chạm vào nút gọi này thì sẽ báo được về tổng đài tình trạng cần giúp đỡ.
- Nút gọi dạng uốn: RCB-760A có cảm chạm, làm từ nhựa dẻo, có thể uốn cong được. Đối với những bệnh nhân không thể di chuyển, không điều khiển được lực tay cầm, khi cần sự trợ giúp chỉ cần bóp vào nút gọi sẽ thông báo đến điều dưỡng.
- Nút gọi gắn ở thanh ngang giường bệnh: RCB-770E dùng để thông báo cho điều dưỡng khi bệnh nhân chỉ có khả năng di chuyển tay ở phạm vi nhỏ.
- Cảm biến gọi đa chức năng: RCB-780E, RCS-102 có cảm biến giọng nói/hơi thở, cảm biến chạm, cảm biến ánh sáng, có đèn báo sáng vào ban đêm. Các cảm biến này sẽ giúp bệnh nhân thông báo với điều dưỡng khi cần thiết.
- Phần mềm thống kê cuộc gọi: CCNE-01CR, CCNE-02CR: có khả năng thống kê có bao nhiêu cuộc gọi thường, có bao nhiêu cuộc gọi khẩn cấp, khoa bệnh nào có nhiều cuộc gọi khẩn cấp, tốc độ xử lý các cuộc báo gọi của điều dưỡng và bác sĩ.