



Hugging Peoples

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

ĐC: 65 LÃNH BINH THẮNG, P.12, Q.11, TP.HCM, VN

MST: 0313998097

ĐT: 02822 531611

FAX: 02822 531612

Email: info@dkmedica.vn



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TÊN DỤNG CỤ: Dụng cụ thăm khám, chẩn đoán và phụ kiện các loại

1. Dụng cụ trước khi đưa vào sử dụng phải được làm sạch, khử trùng và hấp tiệt trùng theo đúng quy định của nội hấp ướt tiệt trùng đối với dụng cụ phẫu thuật.

Hấp ướt tiệt trùng: thời gian hấp, nhiệt độ và áp suất tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy hấp tiệt trùng.

2. Dụng cụ sau khi sử dụng:

- ✓ Ngâm khử khuẩn
- ✓ Làm sạch đại thể dưới vòi nước chảy
- ✓ Làm sạch vi thể bằng tay với bàn chải và dụng cụ chuyên dụng hoặc bằng máy rửa siêu âm hoặc máy rửa chuyên dụng.
- ✓ Dụng cụ sau khi làm sạch phải lau khô hoặc sấy khô
- ✓ Loại bỏ những cặn dư thừa và gỉ sét trước khi đóng gói tiệt trùng.
- ✓ Không để dụng cụ gỉ sét chung với các dụng cụ khác để chống sự làm hư các dụng cụ khác do sự ăn mòn điện hóa.
- ✓ Không ngâm dụng cụ trong dung dịch ăn mòn vì sẽ làm dụng cụ bị gỉ sét do sự ăn mòn hóa học. Ví dụ như nước muối.
- ✓ Dụng cụ sau khi làm sạch phải được bảo quản bằng dầu bảo chuyên dụng cho dụng cụ phẫu thuật trước khi đóng gói và hấp tiệt trùng. Dụng cụ sau khi tiệt trùng phải bảo quản ở phòng vô trùng.
- ✓ Phương pháp tiệt trùng bằng hấp hơi nước: thời gian hấp, nhiệt độ và áp suất tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy hấp.

3. Quá trình sử dụng phẫu thuật: mỗi dụng cụ đều có chức năng riêng, phẫu thuật viên phải tuân thủ theo chức năng của dụng cụ để đảm bảo tuổi thọ và an toàn cho bệnh nhân. Ví dụ kéo bóc tách không dùng để cắt gân, cơ vì sẽ làm gãy kéo.