

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TAY KHOAN NHA KHOA

Hãng sản xuất: TPC Advanced Technology.,INC.

Nước sản xuất: Mỹ

I. Tay khoan nha khoa siêu tốc

1.1. Cách kết nối/ngắt kết nối tay khoan với ghế nha khoa

A. Kết nối khớp nối nhanh với tay khoan


B. Chèn tay khoan vào khớp nối vòng đầu nối đẩy lùi

Lưu ý: Đảm bảo tay khoan được kết nối chặt chẽ với khớp nối nhanh

C. Ngắt kết nối tay khoan khỏi khớp nối. Trượt lại vòng đầu nối của khớp nối và tháo bỏ tay khoan.

1.2. Gắn/tháo mũi khoan nha khoa vào tay khoan


A. Nhấn nút ấn bằng ngón tay cái và chèn mũi khoan, sau đó nhả nút ấn

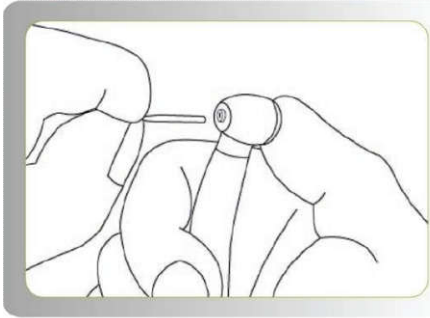

B. Tháo mũi khoan: Hãy chắc chắn rằng mũi khoan ngừng hoạt động đầu tiên và sau đó nhấn nút ấn bằng ngón tay cái và tháo mũi khoan ra.


1.3 Bảo dưỡng

A. Loại bỏ mũi khoan, sau đó chải sạch các mảnh vỡ răng ở tay khoan.

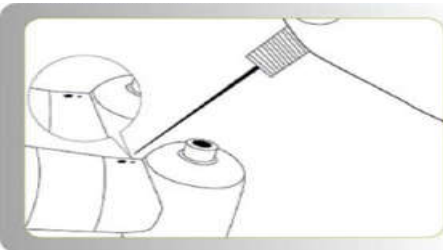


B. Sử dụng giấy lau tay khoan để làm sạch lỗ phun nước và lỗ khí.

C. Phun dầu tra tay khoan trong 1-2 giây vào lỗ trục chính (cổng mũi khoan).

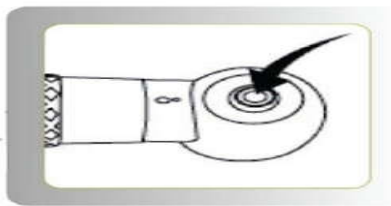

C. Phun dầu tra tay khoan trong 2-3 giây vào lỗ khí ở phía sau tay khoan

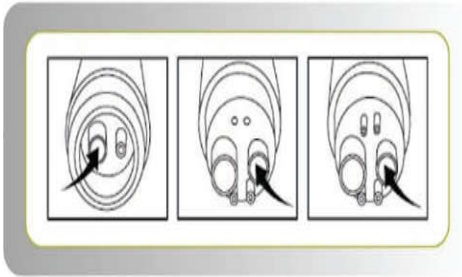


- E. Kết nối tay khoan với khớp nối nhanh. Chắc chắn là nước đã được tắt.
 - F. Đặt miếng gạc quanh khu vực tháo/lắp mũi khoan. Giữ gạc với bất kì tiếp xúc với mũi khoan để tránh vướng víu.
 - G. Nhấn bàn đạp ga trong 20 giây và kiểm tra xem có bất kì bụi bắn nào trên gạc không.
 - H. Lặp lại bước này để loại bỏ hết bụi bắn trong tay khoan
 - I. Sau khi điều trị, hãy khử trùng tay khoan ở nhiệt độ 135 độ trong 15 phút.
- Chú ý: Không nhúng tay khoan vào dung dịch khử trùng và nước.


II. Tay khoan nha khoa tốc độ chậm

2.1. Cách thao/lắp tay khoan và mũi khoan

- A. Kết nối phía dưới của tiếng ồn thẳng hoặc cong c một đến chèn động cơ khí.

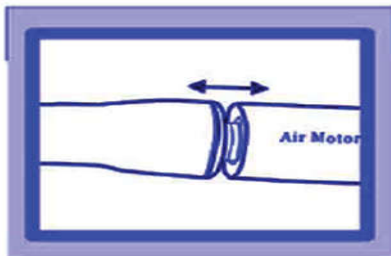

- B. Để điều chỉnh động cơ, hãy sử dụng vòng thay đổi để điều chỉnh tốc độ khi vận hành. Đối với lưu lượng nước bên trong HP, bạn cũng có thể làm hao mòn lưu lượng nước bằng

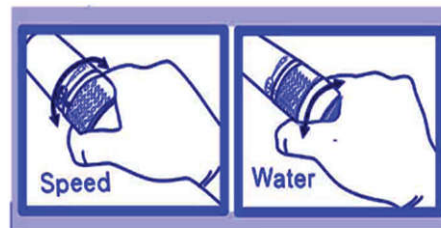

cách sử dụng vòng điều chỉnh thấp hơn.

- C. Để lắp mũi khoan vào tay khoan, quay vòng khóa theo chiều kim đồng hồ để mở. Khi đã lắp được mũi khoan vào, xoay vòng khóa theo chiều kim đồng hồ để khóa chốt lại.




2.2. Cách bảo dưỡng tay khoan tốc độ chậm

A. Dùng giấy lau tay khoan làm sạch bất kì mảng vụn nào từ lỗ khí và lỗ nước.



B. Phun dầu tra tay khoan trong 1-2 giây vào lỗ trục chính.

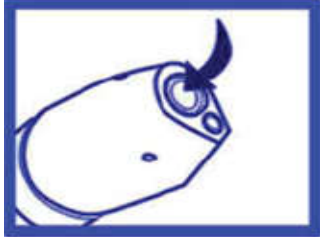

D. Phun dầu tra vào lỗ thông khí của động cơ tốc độ chậm.



D. Nhấn bàn đạp ga trong 20 giây để loại dầu thừa khỏi động cơ tốc độ chậm.