

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG M-30R RINSE

### Thành phần hoạt tính

Sodium Sulfate Anhydrous.....3.0 – 5.5 g/L

Sodium Chloride.....7.5 – 11.5 g/L

Anti-fungal and Anti-bacterial Agents ...1.0 – 3.0 mL/L

Polyoxyethylene.....0.8 – 2.5g/L

Sử dụng cho các máy huyết học của Mindray các model: BC-3000Plus, BC-3000CT, BC-3200, BC-3600

Sử dụng như một thuốc thử làm sạch với chức năng làm sạch các thành phần của máu. Sử dụng trực tiếp trong vận hành thiết bị

### Cảnh báo

Không được hít vào và/hoặc nuốt phải. Trong những trường hợp này cần đến gặp bác sĩ để được tư vấn phương pháp xử lý

Tránh để dính vào mắt. Trong những trường hợp này, cần làm sạch vùng bị ảnh hưởng với nước sạch, rửa nhiều lần

Tránh để dính vào mắt. Trong những trường hợp này, cần làm sạch vùng bị ảnh hưởng với nước sạch, rửa nhiều lần và đến gặp bác sĩ để tư vấn

### Lưu trữ và bảo quản

Sản phẩm được lưu trữ ở 2°C đến 30°C. Đóng nguyên trong hộp

Nếu sản phẩm đã bị đông lạnh (một phần hoặc hoàn toàn), có thể làm ấm sản phẩm ở nhiệt độ phòng trước khi trộn. Trộn sản phẩm bằng cách lật ngược nhẹ nhàng. Chạy background trước khi phân tích kết quả mẫu bệnh phẩm trên bệnh nhân

Nếu nhiệt độ môi trường là 15°C đến 30°C, khi đã mở thùng chỉ được sử dụng trong 60 ngày

Loại bỏ chất thải và sản phẩm không sử dụng theo yêu cầu của chính quyền địa phương

**Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd**

**Mindray Building, Keji 12<sup>th</sup> Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057  
P.R.China**



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
LÊ THÀNH NGHỊ**