

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
NATRI CLORID 0.9% Dạng xịt mũi
BLUE SALT

Thành phần: - Dung dịch nước muối sinh lý có chứa các khoáng chất theo công thức Nước muối biển chứa các khoáng chất . NA^+ , ZN^{2+} , MG^{2+} , Tinh dầu tự nhiên

Công dụng : Dùng để chăm sóc , làm sạch , làm loãng chất nhầy mũi, vệ sinh mũi , chống bụi bẩn , loại bỏ gỉ mũi.

Giúp mũi thông thoáng hơn, phòng và hỗ trợ cảm cúm khi thời tiết thay đổi .
Sản phẩm dùng an toàn trong thời gian dài. Không chứa chất bảo quản.

Cách dùng mở nắp bảo vệ . để chai xịt theo phương thẳng đứng, cho vòi phun vào hốc mũi . ngón trỏ để lên phía trên vòi xịt. bấm xịt 2-3 lần . ngày 2-6 lần . và lặp lại với bên còn lại ngay sau đó .

Có thể lặp lại mỗi bên vài lần nếu cần để loại bỏ dịch và virus tốt hơn. Lau vòi xịt trước khi đóng nắp , nắp lại chai khi không sử dụng, tránh nhiễm tạp khuẩn.

Chống chỉ định: chưa phát hiện

Cảnh báo và thận trọng: dùng cho trẻ sơ sinh phải có chỉ định giám sát của bác sỹ .

Tác dụng bất lợi có thể xảy ra: chưa phát hiện

Bảo quản: nhiệt độ phòng, để nơi khô mát , xa tầm tay trẻ em.

Hướng dẫn sử dụng được xây dựng bởi **Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành**

Hà nội. ngày 18 tháng 06 năm 2018
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

