

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Giường vận chuyển

Model: YXZ-E



Mô tả sản phẩm

- Kích thước: 1930x640x560-860mm
- Chức năng:
- Nâng-hạ giường bằng tay quay, phạm vi điều chỉnh: 56 - 86cm
- Nâng hạ phần lưng: 0 - 60°
- Hai bên thành giường làm từ nhựa ABS, có thể tháo rời.
- Có cọc truyền bằng inox 304
- Bánh xe kích thước: 150mm, có hệ thống phanh trung tâm.
- Giá treo bình oxy, đường kính 16.5cm.
- Tải trọng: 180kgs

Hướng dẫn sử dụng

- Sử dụng phanh trung tâm đảm bảo giường hoàn toàn cố định.
- Hạ thành giường xuống và chuyển bệnh nhân sang giường.
- Nâng thành giường lên, mở khóa phanh tổng và vận chuyển bệnh nhân đến vị trí mong muốn.
- Sử dụng tay quay điều chỉnh độ cao giường và lưng sao cho phù hợp.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Quỳnh