

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ERBA CLENZ

Code: 50004375

Đóng gói: 1 lít



## Thành phần:

- Muối NaCl < 1.0 %
- Enzyme phân hủy Protein < 1.0 %
- Chất bảo quản < 0.5 %
- Chất ổn định < 2 %
- Nước khử ion

## Mục đích sử dụng:

Dùng để làm sạch, trắng và rửa các bộ phận của máy phân tích huyết học Erba Elite 3 và Erba Elite 5.

## Hướng dẫn sử dụng:

- Để bình hóa chất ở nhiệt độ phòng ít nhất 12 giờ trước khi sử dụng
- Mở nắp bình và đặt các ống hút hóa chất vào
- Thiết lập chương trình cho máy và tiến hành rửa máy.

## Cảnh báo và thận trọng:

- Tránh để hóa chất tiếp xúc với mắt, da, quần áo. Tránh nuốt phải.
- Luôn đậy chặt nắp bình hóa chất sau khi sử dụng. Mang găng tay khi thao tác.
- Không sử dụng bình hóa chất đã hết hạn.
- Không sử dụng bình hóa chất đã bị đông đá.
- Không sử dụng bình hóa chất đã mở nắp sau 120 ngày

Bảo quản: 15-30°C/8h hoặc 2 - 8°C/24h