



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên trang thiết bị y tế	Băng chăm sóc vết sẹo sau phẫu thuật
Chủng loại	Atofine 30mm x 49mm Atofine 50mm x 114mm Atofine 50mm x 164mm
Chỉ định	Bảo vệ những vết sẹo sau phẫu thuật. Bảo vệ vết sẹo tránh khỏi các tác động bên ngoài: sự kéo căng, ma sát hoặc tia cực tím.
Hướng dẫn sử dụng	1. Bóc miếng giấy lót ở giữa ra. 2. Điều chỉnh sao cho "vết sẹo" nằm ở trung tâm của miếng băng, dán vào và chú ý không kéo căng miếng băng. 3. Bóc hai miếng giấy lót còn lại và chú ý không kéo căng miếng băng.
Chú ý khi dùng	Vui lòng không sử dụng trực tiếp lên vết thương hở và đường mũi khâu trước khi cắt chỉ. Làm sạch và khô vùng da trước khi dán băng. Khi dán lưu ý không kéo căng miếng băng vì có thể gây phát ban da hoặc làm miếng băng bị bong tróc. Trường hợp bị phát ban, tấy đỏ, ngứa... do sử dụng sản phẩm này thì vui lòng ngưng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ. Để không gây tổn thương đến da và vết sẹo khi tháo băng ra, nhẹ nhàng tháo miếng băng từ mép cạnh của miếng băng và gỡ dần dần về hướng của vết sẹo. Tháo từ từ dọc theo chiều lông để hạn chế tổn thương da.
Bảo quản	Bảo quản ở nơi thoáng mát với độ ẩm thấp, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp và ngoài tầm tay trẻ em.