


# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY QUÉT DẤU NHA KHOA KỸ THUẬT SỐ CAD/CAM



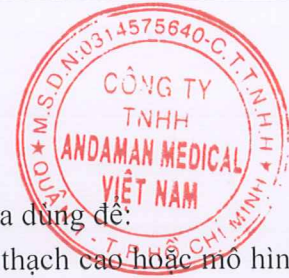

### Chỉ định sử dụng


Máy quét đầu nha khoa kỹ thuật số CAD/CAM và phần mềm nha khoa dùng để:

- Ghi nhận lại đặc điểm từ bề mặt răng thông qua các mô hình thạch cao hoặc mô hình vòm trên, vòm dưới hoặc toàn hàm.
- Lưu trữ các mô hình 3D.
- Thiết kế, hỗ trợ nha sĩ trong quá trình phục hồi, chỉnh nha.


### Hướng dẫn sử dụng

#### 1. Quy trình lắp đặt


- Đặt máy trên mặt phẳng cố định nằm ngang.
- Đảm bảo là các băng dính, phụ tùng bảo vệ máy đã được tháo rời.
- Kết nối PC và kết nối với ổ cắm điện được nối đất theo nguồn điện được cho phép.
- Kết nối nguồn điện cho thiết bị.

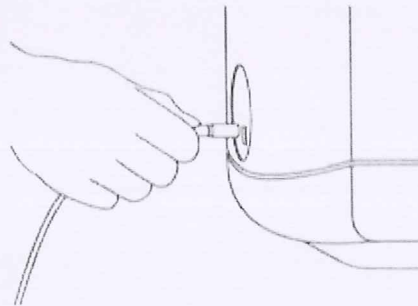

- Kết nối PC với các thiết bị bằng cáp USB kèm theo.

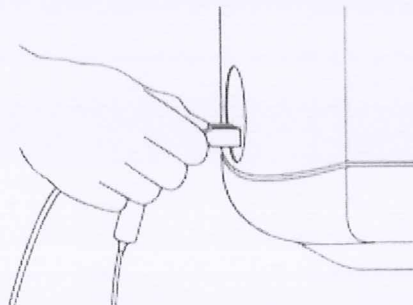

- Kết nối nguồn điện đơn vị với ổ cắm điện được nối đất theo nguồn điện được cho phép.
- Bật thiết bị.

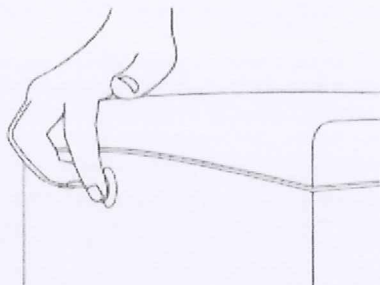


## 2. Vệ sinh thiết bị

- Dùng vải khô, mềm để lau sạch thiết bị.
- Có thể dùng khăn ẩm để vệ sinh phần ngoài của thiết bị.
- Không dùng các loại dung môi làm sạch như: rượu, xà phòng,... trên bất kỳ bộ phận nào của thiết bị.
- Không nên để thiết bị ướt vì có thể gây rò rỉ điện bên trong.

## Cảnh báo

- ✓ Không nên chạm vào camera hay bộ phận quét bên trong thiết bị sẽ gây ảnh hưởng đến kết quả.
- ✓ Tuân thủ những cảnh báo và thận trọng khi sử dụng máy
- ✓ Cho quá trình quét được chuẩn xác, nên mở máy ít nhất 30 phút trước khi sử dụng.
- ✓ Không nên đặt thiết bị ở nơi ẩm ướt, khói, dơ vì có thể gây hỏng, và cháy điện.
- ✓ Khi di chuyển thiết bị nên luôn giữ bên dưới với mặt sau thiết bị quay về hướng người di chuyển.

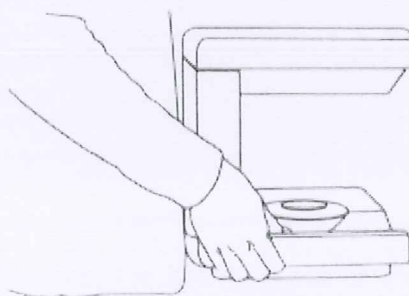

- ✓ Luôn tháo rời các bộ phận kết nối trước khi di chuyển thiết bị.
- ✓ Không nên che chắn hoặc chặn lỗ thông hơi của thiết bị, nhằm tránh gây tình trạng nóng máy và ảnh hưởng đến kết quả.

Tham khảo thêm sách hướng dẫn sử dụng của thiết bị