

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TAI NGHE TIM PHỔI KIWI

MODEL: KW111

## 1. Thay đổi tần số nghe dùng công nghệ màng nghe “Tunable”

Tai nghe được trang bị công nghệ màng nghe “Tunable” cho phép nghe âm có tần số thấp và cao mà không cần phải xoay mặt nghe.

Để giảm áp lực cặp vào, nắm 2 đầu quai nghe và kéo giãn từ từ.

## 2. Nghe âm tần số thấp: áp nhẹ mặt nghe lên da như cách nghe truyền thống.

Để tăng áp lực cặp vào tai, dùng 1 tay đặt ngay phân tiếp giáp quai kim loại và phân cao su mềm và bóp 2 càng nghe vào, lặp lại nếu cần.

## 3. Nghe âm tần số cao: áp và nhấn mặt nghe xuống da để nghe âm tần số cao

4. **Điều chỉnh quai tai nghe:** thiêu kế đặc biệt giúp ôm kín tai và tiện lợi. Quai tai nghe thiết kế theo chiều giải phẫu của ống tai nghe.

## 5. Thay thế màng nghe và vệ sinh mặt nghe:

Dùng 2 ngón tay cái ấn vòng nghe tại 1 điểm cho tách ra khỏi mặt nghe, sau đó tiếp tục miết cho vòng quanh nhựa tách rời khỏi mặt nghe

Tháo mặt nghe khỏi vòng nghe và vệ sinh với xà phòng hoặc cồn. Lau khô trước khi gắn lại.

## ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP



*[Handwritten signature]*

**GIÁM ĐỐC**

*Nàng Nguyễn Văn Lợi*