

- Phần giữa có khoét lỗ để bỏ vệ sinh.
- Một cây truyền dịch
- Hai đầu giường làm bằng nhựa ABS có thể tháo lắp dễ dàng.
- Thanh chắn hai bên thành giường làm bằng nhôm và có thể xếp gọn dễ dàng. Có vị trí để gắn thêm bàn ăn cho giường.
- Khung giường được dập khuôn và xử lý qua công nghệ sơn phun tĩnh điện, tăng độ bền và chống gỉ sét.

Lưu ý:

- Giường phù hợp cho bệnh nhân cao dưới 190 cm, nặng dưới 175 kg
- Nên kiểm tra định kỳ 6 tháng 1 lần
- Dùng thuốc sát trùng để làm vệ sinh định kỳ 3 tháng 1 lần. Không dùng các chất ăn mòn để làm vệ sinh giường.
- Nên khóa bánh xe giường lại sau khi lắp ráp.
- Không được đứng trên đầu hay đuôi giường

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cấu hình



Sử dụng tay quay: xoay tay quay để điều chỉnh góc của giường.

Những vị trí điều chỉnh



- Nghiêng 2 bên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN

VPGD: 454 Hoàng Hoa Thám – Tây Hồ - Hà Nội

Tel: 043.7614789 – 04.666 222 97

Mobile : 0913067226

Webside: tbythoangnguyen.com

Email: tbythoangnguyen@gmail.com