

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG NHANH ĐÈN MỒ DI ĐỘNG GS 900

1. Lắp phần đầu đèn có hộp điều khiển vào đế trực đỡ có bánh xe.
2. Xoay vít cố định
3. Giữ cho hộp điều khiển thẳng như hình vẽ
4. Cắm dây điện
5. Gạt tay lên xuống trước nút đèn số 4 để BẬT / TẮT đèn, điều chỉnh độ sáng của đèn.
6. Điều chỉnh đèn cao thấp theo ý muốn bằng cách kéo tay cầm phía trên đầu đèn.

CHÚ Ý

- Bạn hãy chắc chắn rằng các khớp nối được nối với nhau chắc chắn.
- Không treo các vật dụng khác lên đèn.
- Làm sạch đèn bằng vải mềm, nước ấm và xà phòng tẩy nhẹ; hoặc sử dụng cồn 70 độ; hoặc dung dịch thuốc tẩy 10%

