

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GĂNG TAY KHÁM BỆNH AURELIA



## 1. Hướng dẫn sử dụng.

- Găng tay sử dụng một lần làm từ cao su tự nhiên.
- Nên chọn kích cỡ phù hợp để đeo cho cả tay trái và tay phải.
- Găng tay khám bệnh dùng để bảo vệ người sử dụng và bệnh nhân trước các vấn đề vệ sinh và lây nhiễm bệnh.
- Găng tay chưa tiệt trùng nên không dùng thay thế cho găng phẫu thuật.
- Khi sử dụng cần vệ sinh tay và tháo bỏ ngay sau khi sử dụng.
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

## 2. Chống chỉ định và cảnh báo:

- Găng được làm từ cao su tự nhiên có thể gây dị ứng với một số người có cơ địa dị ứng với cao su được khuyến cáo không nên sử dụng.
- Không dùng khi găng bị rách, có lỗ thủng.
- Không dùng tiếp xúc với xăng, dầu và các chất ăn mòn hóa học.
- Sau khi sử dụng phải hủy trong lò đốt rác y tế theo quy định của bộ y tế.
- Tránh đèn ở nhiệt độ cao (40oC, 104oF)

Tên.Nhà Sản xuất: **SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING Sdn.Bhd.** Located at Lot 38, Putra Industrial Park, Bukit Rahman Putra, 47000 Sungai Buloh, Selangor, Malaysia

Tên Chủ sở hữu: **MAXTER GLOVE MANUFACTURING Sdn.Bhd.** Located at Lot 6070, Jalan Haji Abdul Manan, 6th Miles Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor, Malaysia.

Tên thiết bị: “Găng tay khám bệnh”