

QUY TRÌNH VẬN HÀNH MÁY PHÂN TÍCH ĐIỆN GIẢI



Bước 1

Khi máy ở chế độ chờ

Standby

Chọn No

Must use Rinse

(Rửa trước khi chuẩn máy)

Daily Rinse

(Rửa máy hàng ngày)

Chọn Yes

Probe in Rinse

(Đưa dung dịch rửa vào kim hút)

Chọn Yes

(Máy tự động hút và rửa)

Standby

Chọn No

Calibrate Now? (Chuẩn máy)

Chọn Yes

Bước 2

Bước 3

Đợi máy tự chuẩn trong vòng 2 phút. Khi máy chuẩn xong kiểm tra các giá trị chuẩn

Analyze Blood? (Phân tích mẫu)

(Nếu bấm nhầm thì cứ chọn "No" bao giờ ra Analyze Blood là được)

Chọn Yes

(Kim hút hạ xuống)

Probe in Sample?

(Đưa Cup huyết thanh vào kim hút)

Chọn Yes

(Giữ Cup bệnh phẩm để kim tự hút đến khi kim đưa lên thì bỏ Cup ra)

Máy tự phân tích và in ra kết quả

Chọn Yes

Analyze Blood? (Làm lại từ bước 4)