

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỦA HỘP HẤP DỤNG CỤ VÀ PHỤ KIỆN

1. Cách sử dụng:

- Đặt dụng cụ vào khay lưới hoặc miếng lót silicon đựng trong hộp hấp, đóng kín nắp hộp, cài thêm test chỉ thị nhiệt độ phía bên ngoài hộp để đảm bảo dụng cụ được hấp đến nhiệt độ tiệt trùng.
- Hộp hấp không được để quá nhiều dụng cụ để hấp, vì nhiều dụng cụ sẽ không đảm bảo tiệt trùng.
- Sau khi hấp xong, nên tách nắp hộp, thân hộp, khay lưới và miếng lót silicon ra để khô thoáng.
- Chỉ thị nhiệt chỉ dùng một lần cho một lần hấp.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

