

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CHÍNH HÌNH

MÔ TẢ

- Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình được làm bằng nhiều vật liệu thường được sử dụng trong các thủ tục chỉnh hình bao gồm thép không gỉ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế cho các thiết bị này.
- Một số dụng cụ được làm bằng thép không gỉ và mặc dù chúng có thể được hấp bằng hơi, nhưng một số chất tẩy rửa không được sử dụng.

MỤC ĐÍCH

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình được chỉ định để sử dụng trong phẫu thuật, với sự giúp đỡ của dụng cụ này bác sĩ phẫu thuật có thể dễ dàng hoàn thành phẫu thuật chỉnh hình.

CHỈ ĐỊNH

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình được sử dụng theo cách thủ công để sử dụng trong phẫu thuật chỉnh hình.

CẢNH BÁO

- Không được sử dụng sản phẩm nếu phát hiện có hư hỏng trên bao bì và phải được trả lại cho nhà sản xuất. Hoặc có thể được khử trùng trong bệnh viện với nhiệt độ và áp suất thích hợp theo các thông số tiết trùng được khuyến cáo.
- Các phương pháp sử dụng dụng cụ sẽ được xác định bởi kinh nghiệm và quá trình đào tạo của người sử dụng về thủ tục phẫu thuật.
- Không sử dụng các dụng cụ này cho bất kỳ hoạt động nào khác so với chỉ định. Các dụng cụ này nên được coi như là một dụng cụ chính xác và phải được đặt cẩn thận.



trên các khay và vệ sinh sau mỗi lần sử dụng. Được bảo quản theo các phương pháp và thực tiễn chung của bệnh viện.

- Tất cả các bộ phận phải được làm sạch và khử trùng trước khi sử dụng. Các thiết bị cần được kiểm tra cẩn thận trước khi sử dụng cho các chức năng, sự mài mòn hoặc hư hỏng. Không nên sử dụng dụng cụ bị hỏng vì điều này có thể làm tăng nguy cơ bị hỏng hóc và gây thương tích cho bệnh nhân

LÀM SẠCH VÀ CHỐNG LÂY NHIỄM

- Sản phẩm được cung cấp là sản phẩm chưa được tiệt trùng nên cần khử trùng trước khi sử dụng.

- Để làm sạch và khử trùng người sử dụng cần phải thực hiện quá trình tẩy rửa và khử trùng thích hợp. Chỉ nên sử dụng các chất tẩy rửa có độ pH trung tính. Phải xem xét các hướng dẫn của nhà sản xuất để chuẩn bị làm sạch và khử trùng tương ứng.

- Tất cả dụng cụ trước hết phải được làm sạch bằng cách sử dụng phương pháp bệnh viện được thành lập trước khi khử trùng và đưa vào buồng phẫu thuật vô trùng. Làm sạch và khử trùng có thể bao gồm việc sử dụng chất tẩy rửa trung tính, sau đó rửa bằng nước khử ion.

Lưu ý: Một số dung dịch vệ sinh như chất tẩy trắng hoặc formalin có thể làm hỏng một số thiết bị và không được sử dụng.

LƯU TRỮ

- Lưu trữ nơi khô ráo, không bụi, không có tác động của lực từ bên ngoài, không có sự thay đổi nhiệt độ và không nằm trong khoảng cách ảnh hưởng của phương tiện mạnh

- Nên để trong khay, thùng chứa, tủ

- Khi sắp xếp dụng cụ, phải luôn đặt các dụng cụ nặng hơn bên dưới và dụng cụ nhẹ hơn bên trên và đặt dụng cụ trên một miếng vải hoặc khăn

KHỬ TRÙNG

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình nên được tiệt trùng bằng phương pháp tiệt trùng nhiệt ẩm ở 132°C trong 15 phút trước khi sử dụng để phẫu thuật. Nhiệt độ tiệt trùng không được vượt quá 137°C

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình được làm bằng nước và hợp kim nhôm được xử lý trong các thùng khử khuẩn hoặc bồn rửa bằng khí oxy hóa trong các bồn rửa nước được lắp cho các thiết bị này.

Một số dụng cụ được làm bằng thép không gỉ và một số dụng cụ khác làm bằng nhôm, nhưng tất cả các tùy chọn không được sử dụng.

MỤC ĐÍCH

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình được chỉ định để sử dụng trong các thủ thuật vết thương để rửa dụng cụ này bằng bộ phận phẫu thuật có thể để dụng cụ này được tiệt trùng chính xác.

CÁCH DÙNG

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình được sử dụng theo cách mà chúng đã được trình bày trong phần hướng dẫn sử dụng.

CÁCH RỬA

Khi rửa dụng cụ bằng các phương pháp rửa tay, cần lưu ý rửa kỹ các khe rãnh của tay cầm của các thiết bị. Nếu có thể, dụng cụ này nên được rửa trong bồn rửa với vòi xịt để có thể loại bỏ mọi dư thừa các dụng cụ đặt trong bồn. Rửa kỹ các

Các phương pháp sử dụng dụng cụ sẽ được làm sạch bởi kính kỹ thuật và quá trình rửa tay của người sử dụng sẽ được xử lý theo phần hướng dẫn.

Khi rửa tay dụng cụ bằng tay, cần lưu ý rửa kỹ các dụng cụ này và rửa kỹ tay. Các dụng cụ này nên được rửa như là một dụng cụ giống các dụng cụ phẫu thuật.

