




TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BUỒNG ĐỆM HEN SUYỄN SPACE CHAMBER PLUS
HANG UC

STT	Tên trang thiết bị	Mã sản phẩm	Mục đích sử dụng	Hướng dẫn sử dụng	Hãng, nước sản xuất	Hãng, Nước sản xuất
01	BUỒNG ĐỆM HEN SUYỄN SPACE CHAMBER PLUS		- ĐÂY LÀ MỘT THIẾT BỊ BUỒNG ĐỆM HỖ TRỢ CHO ỜNG THUỐC HEN SUYỄN, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ LÀ MỘT BUỒNG ĐỆM THỂ TÍCH 230ML, ĐẦU VAN XÁ QUẢ KHE VÀ NẮP ĐẬY Ở CUỐI BUỒNG ĐỆM.	<ol style="list-style-type: none">1. Yếu tố chính thiết bị là SpaceChamber Plus với ống thuốc hen suyễn2. Tháo nắp ra khỏi ống hít và lắc đều.3. Đẩy ống hít vào phần đáy của thiết bị SpaceChamber Plus4. Đặt đầu ống giữa môi và không cho khe hở5. Thả ống thở của bạn6. Hít thở sâu qua miệng và giữ trong 5-10 giây hoặc tiếp tục hít vào và thở ra qua SpaceChamber Plus trong 4-6 lần thở7. Chờ ít nhất 1 phút	Sản xuất Đài loan	Chủ sở hữu sp: Úc

										
						<p>trước khi lập lại bước</p> <p>4. Chỉ sử dụng một liều từ ống hít một lần.</p> <p>Nếu cần một mặt nạ Comfy mask, gắn mặt nạ comfy mask vào Space Chamber Plus và làm từ bước từ 1 đến 7.</p>				

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



Phan Ngọc Tường Hải