

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM BẢO VỆ TIA X

1. Người sử dụng có thể chọn các loại sản phẩm bảo vệ khác nhau (Áo chì, váy chì, tạp dề chì, cổ chì, tấm chì bảo vệ bộ phận sinh dục, găng tay chì, kính chì bảo vệ mắt)
2. Các sản phẩm bảo vệ chủ yếu được sử dụng cho những người thường xuyên phải làm việc với bức xạ để giữ cho cơ thể được an toàn và ngăn chặn sự tán xạ của tia X.
3. Trước khi sử dụng, người dùng nên kiểm tra bề mặt vải của sản phẩm (bên trong và bên ngoài) xem có được đảm bảo, mối nối của các phụ kiện có chắc không và sự suy giảm tương đương trên nhãn có phù hợp để sử dụng không.
4. Sau khi kiểm tra, mang sản phẩm bảo vệ tia X vào như hình ở bảng dưới.
5. Sau khi sử dụng, đặt sản phẩm bảo vệ ngay thẳng hoặc treo lên móc treo áo để tránh bị ảnh hưởng trong thời gian dài.
6. Bảo quản sản phẩm trong phòng thông thoáng, không có ánh nắng mặt trời và tránh xa nguồn nhiệt để đảm bảo tuổi thọ sản phẩm.



Transmed

Giải pháp tổng thể



Đại diện cơ sở đăng ký công bố



📍 C8 No 20, ĐTM Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
☎ (844) 3640 4550 📞 (844) 3640 5497 ✉ info@transmed.com.vn

www.transmed.com.vn