


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÂY TRUYỀN MÁU

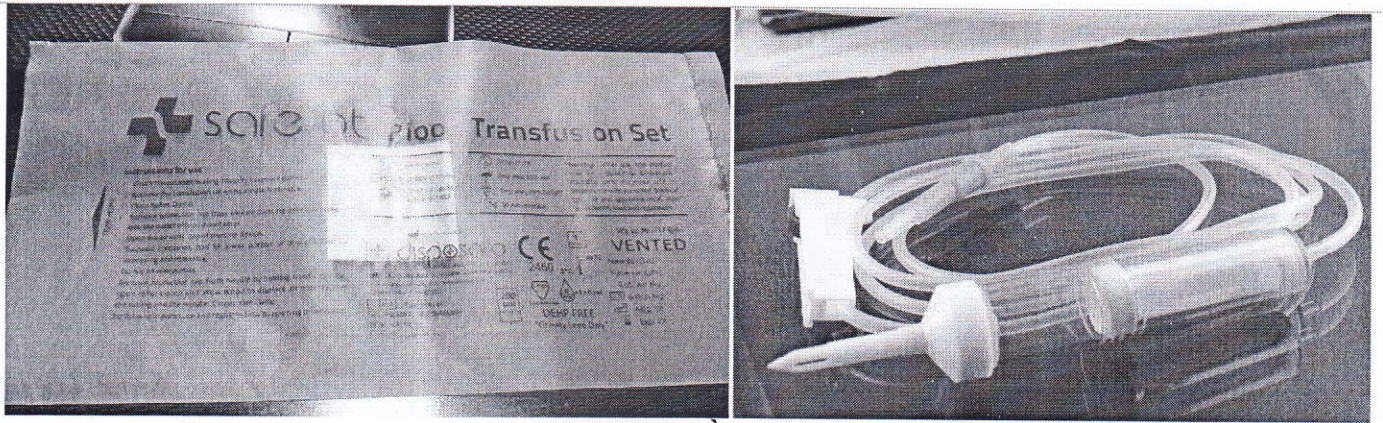

Dây Truyền máu

Hướng Dẫn sử dụng :

- Khóa đường truyền bằng con lăn trên dây truyền máu sau đó tháo nắp bao đầu nhọn rồi cắm sâu vào túi máu theo hướng thẳng.
- Đảm bảo túi máu đã được liên kết chặt chẽ với dây truyền máu dùng ngón tay bóp nhẹ vào bầu đếm giọt của dây truyền máu để máu lưu thông chảy về bầu đếm giọt đến một nửa bầu.
- Mở khóa đường truyền, tới khi máu lưu thông chảy đến đầu kim thì khóa đường truyền lại.
- Mở nắp bảo vệ ở đầu kim .thực hiện lấy ven
- Mở khóa đường truyền để bắt đầu quá trình truyền máu.



Nguyễn Cát Triệu

Nhà sản xuất:
DISPOSAFE HEALTH AND LIFE CARE LTD
Plot No. 1&2, Sector-59, Phase-2, Ballabgarh,
Faridabad-121004, Haryana, India

Nhà phân phối độc quyền:
CÔNG TY TNHH TM & DVKT NGUYỄN LÂM
107 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp,
Tp.HCM, Việt Nam