


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN MỔ DI ĐỘNG

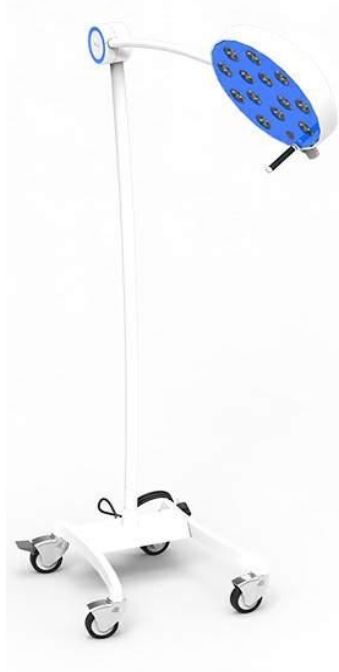

- Lắp thân đèn vào chốt nối với chân đèn.
- Gắn bầu đèn vào đầu cây đèn, xoay và cố định bầu đèn bằng cách vặn trục ở bầu đèn theo chiều ngược đồng hồ.
- Kết nối nguồn cắm ở chân đèn, bật công tắc đèn trên bầu đèn.
- Di chuyển đèn bằng cách đẩy bánh xe.
- Điều chỉnh góc chiếu sáng bằng cách gập thân đèn và xoay bầu đèn. Điều chỉnh độ sáng bằng nút tăng giảm trên bầu đèn.



*Đinh Nguyễn Thiên Kim*