



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED

Trụ sở: Số 2, TT15 KhuĐT Văn Phú, P. Phú La, Hà Đông, Hà Nội

VPĐD: Số 64 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0466849039 – Fax 0466849039

Email: Sales@hadimed.com.vn Website: www.hadimed.com.vn

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên cơ sở: Công ty cổ phần công nghệ Hadimed

Địa chỉ: Số 2, TT15, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2018

**TÊN THIẾT BỊ Y TẾ: DỤNG CỤ BANH, NÂNG DÙNG TRONG PHẪU THUẬT
(ELEVATOR, RETRACTOR, HOOK, SPATULAS, SPECULUM, SPREADER)**

Sản phẩm chỉ được sử dụng bởi bác sỹ hoặc kỹ thuật viên chuyên khoa, nguyên tắc sử dụng chung như sau:

1. Dụng cụ sử dụng lần đầu tiên phải được làm sạch, sấy khô và đóng gói tiệt trùng theo quy trình của cơ sở y tế.
2. Dụng cụ tái sử dụng phải được làm sạch hoàn toàn trước khi khử khuẩn hay tiệt khuẩn.
3. Dụng cụ tái sử dụng được tráng và lau khô đúng cách trước khi khử khuẩn hay tiệt khuẩn và để khô trước khi lưu trữ.
4. Dụng cụ vô trùng được tiếp nhận phải được giữ vô trùng cho đến khi sử dụng tiếp theo.
5. Phương pháp tiệt trùng bằng hấp hơi nước, thời gian hấp, nhiệt độ và áp suất theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất máy hấp tiệt trùng.
6. Quy trình tiệt khuẩn phải được giám sát ở mỗi chu kỳ bằng các chỉ thị cơ học và hoá học.
7. Quy trình tiệt khuẩn phải được giám sát định kỳ bằng chỉ thị sinh học.
8. Sau khi tái xử lý phải duy trì độ tiệt khuẩn cho đến thời điểm sử dụng.
9. Không ngâm dụng cụ trong dung dịch ăn mòn sẽ gây gỉ sét, loại bỏ những dụng cụ hư hỏng, gỉ sét trước khi tiệt trùng, không để chung với dụng cụ còn tốt.

Cơ sở y tế phải có nhân viên được huấn luyện đặc biệt, thành thạo chịu trách nhiệm giám sát việc khử khuẩn và tiệt khuẩn. Mỗi dụng cụ đều có đặc tính và chức năng riêng, nhân viên phải hiểu rõ về đặc tính và chức năng để đảm bảo tuổi thọ, độ an toàn cho bệnh nhân.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở


GIÁM ĐỐC
Triều Đức Thành