

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2018/ KL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2018

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỆM HƠI

- . Bước 1: Trải đệm trên giường sao cho đệm không có nếp gấp, có thể gấp phần cuối của đệm (phần không có múi chứa hơi). Có thể trải 1 lớp vải mỏng, thấm hút mồ hôi lên đệm để giữ cho đệm sạch
- Bước 2: Treo máy bơm hơi lên giường hoặc tường, máy có sẵn móc treo gắn với máy
- Bước 3: Cắm 1 đầu dây dẫn khí (dây 2 ống) vào máy, đầu kia cắm vào đệm
- Bước 4: Cắm dây từ máy vào nguồn điện 220V. Vận máy bơm ở mức cao nhất để máy bơm hơi vào đệm. Sau khoảng 20 phút máy bơm sẽ bơm đầy hơi vào đệm, vận máy bơm ở mức trung bình
- Bước 5: Đặt người bệnh nằm lên đệm

Lưu ý: Nếu mất điện hoặc không cắm máy bơm thì đệm sẽ xẹp xuống, vì vậy cần phải cắm điện trong suốt quá trình sử dụng đệm chống loét. Công suất của máy bơm cho đệm chống loét chỉ 7w, mỗi tháng chỉ tốn hơn 5 số điện nếu máy chạy 24/24h

Vệ sinh đệm: lau đệm bằng giẻ mềm, nước sạch hoặc xà phòng pha loãng. Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh để lau đệm. Để đệm khô tự nhiên hoặc dùng quạt, không phơi đệm ra nắng

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC

Giám đốc

