

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SẢN PHẨM DUNG DỊCH VỆ SINH TẠI OVITA

1. THÀNH PHẦN

Sản phẩm dung dịch vệ sinh tai OVITA gồm các thành phần cấu tạo:

1. Bình xịt: được làm bằng nhựa PE, cấu tạo gồm 03 bộ phận: Nắp bình, thân bình, ống dẫn.
2. Dung dịch vệ sinh tai được chứa trong bình xịt với công thức Điều chế cho 15ml thành phẩm:

TT	Thành phần	Khối lượng/20ml
1.	Dịch chiết thất điệp nhất chi hoa	0,005g
2.	Nano bạc (Ag+)	30 ppm
3.	Cồn Ethanol 20°	Vừa đủ 15ml

2. CÔNG DỤNG

- Nhỏ vệ sinh tai hàng ngày.
- Loại bỏ ráy tai và bụi bẩn.
- Hỗ trợ sát khuẩn, kháng viêm, phòng ngừa và làm giảm các triệu chứng viêm ở tai.

3. CÁCH DÙNG

- Mở nắp bảo vệ theo chiều thẳng đứng.
- Đặt nhẹ nhàng vòi phun vào ốc tai
- Nhỏ ngày 3-4 lần, mỗi lần 3 giọt mỗi tai.
- Để dung dịch tiếp xúc với ốc tai 5 phút sau đó lau sạch bằng bông.
- Lau sạch, khô vòi phun, đậy nắp bảo vệ.

4. CẢNH BÁO THẬN TRỌNG

- Trẻ em sử dụng phải có người lớn hướng dẫn;
- Chỉ sử dụng cho trẻ em từ trên 3 tháng tuổi.

5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của dung dịch vệ sinh tai.

6. BẢO QUẢN

- Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nguồn nhiệt.



- Sau khi sử dụng đậy kín nắp.

CÔNG TY TNHH DERMISA VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 501, Số nhà 80 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2,
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Sản xuất tại: Công ty TNHH liên doanh dược phẩm RIO PHARMACY-
Lô Km24, Khu Công nghiệp Phú Nghĩa, Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa,
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

