

CÔNG TY TNHH DERMISA VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 501, Số nhà 80 Phố Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Sản xuất tại: Công ty TNHH liên doanh dược phẩm RIO PHARMACY -

Lô Km24, Khu Công nghiệp Phú Nghĩa, Thôn Nghĩa Hào, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.

SẢN PHẨM DUNG DỊCH VỆ SINH TẠI OVIDA



Ovita
Dung dịch vệ sinh tai

Thành phần:
- Dịch chiết thất diệu nhất chi hoa 0,005g
- Nano bạc 30ppm
- Cồn Ethanol 20% Vừa đủ 10ml

Công dụng:
- Nhỏ vệ sinh tai hàng ngày.
- Loại bỏ ráy tai và bụi bẩn.
- Hỗ trợ sát khuẩn, kháng viêm, phòng ngừa và làm giảm các triệu chứng viêm ở tai.

Cách dùng:
Nhỏ ngày 3 đến 4 lần, mỗi lần 3 giọt mỗi tai. Để dung dịch tiếp xúc với ốc tai 5 phút sau đó lau sạch bằng bông.

Cảnh báo thận trọng:
- Trẻ em sử dụng phải có người lớn hướng dẫn.
- Chỉ sử dụng cho trẻ em từ trên 3 tháng tuổi.

Chống chỉ định:
Người dùng quá mẫn cảm với các thành phần của dung dịch vệ sinh tai.

Bảo quản:
- Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nguồn nhiệt.
- Sau khi sử dụng đậy kín nắp.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 01:2018/DERMISA

Sản phẩm của:
Công ty TNHH DERMISA VIỆT NAM
Phòng 501, số 80 Đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Hà Nội.
Điện thoại: 0866 531 536
Website: ovita.com.vn

Sản xuất tại:
Công ty TNHH Liên Doanh Dược phẩm Rio Pharmacy,
Địa chỉ: Km24, Quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hào, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Ovita
Dung dịch vệ sinh tai

Thành phần:
Thất diệu nhất chi hoa 0,005g
Nano bạc 30ppm
Cồn Ethanol 20% Vừa đủ 10ml

Công dụng:
- Hỗ trợ vệ sinh tai hàng ngày.
- Loại bỏ ráy tai và bụi bẩn.
- Hỗ trợ sát khuẩn, kháng viêm, phòng ngừa và làm giảm các triệu chứng viêm ở tai.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 01:2018/DERMISA

SỐ DK:
LỖ SX:
NCK:
HDD:

Thẻ thông tin:
Hỗ trợ phòng ngừa & giảm triệu chứng viêm tai

Net: 10ml

Ovita
Dung dịch vệ sinh tai

Thành phần:
Thất diệu nhất chi hoa 0,005g
Nano bạc 30ppm
Cồn Ethanol 20% Vừa đủ 10ml

Công dụng:
- Hỗ trợ vệ sinh tai hàng ngày.
- Loại bỏ ráy tai và bụi bẩn.
- Hỗ trợ sát khuẩn, kháng viêm, phòng ngừa và làm giảm các triệu chứng viêm ở tai.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 01:2018/DERMISA

SỐ DK:
LỖ SX:
NCK:
HDD:

Thẻ thông tin:
Hỗ trợ phòng ngừa & giảm triệu chứng viêm tai

Net: 10ml

GIÁM ĐỐC
Lý Văn Tuấn