

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PHÂN TÍCH ĐIỆN GIẢI MODEL : Elyte T6B

Cách sử dụng như sau:

- 1/ bật nguồn thiết bị (ON)
- 2/ chạy chương trình calibration
- 3/ kiểm tra thuốc thử, bình nước thải trước khi thực hiện
- 4/ chuẩn bị ống mẫu sau khi đã được li tâm
- 5/ nhắc kim hút mẫu ra bên ngoài, đặt ống vào kim hút và nhấn phím (Enter)
- 6/ lấy ống ra bên ngoài dùng giấy vuốt nhẹ bên ngoài kim và hạ kim xuống
- 7/ sau khi đo xong máy cho kết quả trên màn hình hoặc in ra ngoài

CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG MÁY VÀ LÀM XÉT NGHIỆM

1. Khi bật, tắt máy:

- Khi mất điện cần phải tắt máy ngay, đến khi bắt đầu có điện nên để nguồn điện ổn định từ 3 đến 5 phút ta mới bật máy. Nên dùng ổn áp để có điện áp ổn định.
- Chú ý không bật máy luôn sau khi vừa tắt máy. Sau ít nhất 30 giây để máy ổn định mới bật. Nếu bật, tắt đột ngột có thể gây cháy cầu chì và sẽ dẫn đến hỏng các bộ phận khác của máy.

3. Cách bảo quản máy:

- Nên đặt máy ở nơi khô thoáng, không bị ẩm. Tốt nhất là có máy hút ẩm hoặc điều hoà.
- Hàng ngày dù không tiến hành làm xét nghiệm cũng nên bật máy 30 phút để tránh cho máy bị ẩm, mốc.