



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT

Tên sản phẩm: Hộp dụng cụ kẹp thủy tinh thể Cartridge (gồm các Model: PSCST, EMERALDC, 1CART30, 1VIPR30, 1MTEC30)

➤ **Mô tả sản phẩm:**

- Dụng cụ kẹp thủy tinh thể Cartridge dùng để kẹp (gắp) thủy tinh thể khi phẫu thuật.
- Dụng cụ kẹp thủy tinh thể Cartridge được cung cấp vô trùng và chỉ dùng một lần.
- Dụng cụ kẹp thủy tinh thể Cartridge được thiết kế chỉ dùng cho các thủy tinh thể chất liệu Acrylic với bờ OptiEdge của công ty Abbott Medical Optics / AMO.

➤ **Chỉ định:** Dụng cụ kẹp thủy tinh thể Cartridge được thiết kế chỉ dùng cho các thủy tinh thể chất liệu Acrylic với bờ OptiEdge của công ty Abbott Medical Optics / AMO.

➤ **Chống chỉ định:** Không

➤ **Cảnh cáo và thận trọng:** Không

➤ **Tác dụng bất lợi có thể xảy ra:** Không

➤ **Hướng dẫn sử dụng:**

- Hướng dẫn cách xử lý dụng cụ kẹp thủy tinh thể Cartridge (PSCST, EMERALDC, 1CART30, 1VIPR30, 1MTEC30)
- Dụng cụ kẹp thủy tinh thể Cartridge được dùng để gắp các thủy tinh thể chất liệu Acrylic với bờ OptiEdge của công ty Johnson & Johnson Surgical Vision / AMO.
- Dụng cụ kẹp thủy tinh thể Cartridge chỉ dùng một lần, không hấp autoclave lại hoặc vô trùng bằng phương pháp khác.
- Cần bảo đảm dụng cụ kẹp thủy tinh thể Cartridge nằm trong gói bao bì còn nguyên vẹn
- Với dụng cụ kẹp thủy tinh thể Cartridge còn nằm trên khay, bơm chất nhầy dọc theo hai ống của kẹp. Đặt mặt trước của thủy tinh thể lên kẹp với vị trí càng tương ứng hình vẽ trên phần cánh của kẹp. Đặt càng trước vào vị trí lắp ráp. Để càng sau nằm ra ngoài kẹp ở phía sau kẹp.
- Dùng kẹp có thân tròn ép phần bờ của kính xuống phần ống của kẹp, rồi ép phần trung tâm của kính xuống trong khi khép hai cánh lại. Cần bảo đảm phần optic và càng không bị kẹp giữa hai cánh. Cần phải thấy rõ phần đầu của càng trước nằm trong phần ống của kẹp. Càng trước không được gắp lại phía sau. Càng sau nên được để nằm ngoài kẹp.

- Sau khi khép hai cánh lại, đặt kẹp vào rãnh dành cho kẹp trên tay cầm. Đẩy kẹp ra trước đến khi dừng lại.

Khi Phẫu thuật viên đã sẵn sàng để đặt thủy tinh thể vào mắt, cần bảo đảm còng kẹp nằm về phía bên trái của que đẩy và không bị kẹt bởi que đẩy. Đẩy que ra trước đến khi cơ chế vận bắt đầu hoạt động. Tiếp tục đẩy que bằng nút vận đến khi thấy còng trước cách đầu vít của kẹp 1-2mm.



➤ **Hãng sản xuất:** AMO PUERTO RICO MANUFACTURING, INC USA

- **Địa chỉ cơ sở sản xuất:** RD.402 , KM. 4.2 ANASCO, PR USA 00610
- **Tên chủ sở hữu:** Johnson & Johnson Surgical Vision , Inc. / AMO.
- **Địa chỉ chủ sở hữu:** 1700 E. St. Andrew Place Santa Ana, CaliFornia 92705, U.S.A (AMO)