

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TÚI ÉP TIỆT TRÙNG NIÊM PHONG NHIỆT ĐỘ DỤNG CỤ Y TẾ

Mô tả:

- Túi làm bằng phim/giấy y tế nhiều lớp màu xanh, dai, có các chỉ số Hấp bằng hơi nước, khí EO hoặc formaldehyde, niêm phong bằng nhiệt.
- Thiết kế thân thiện với môi trường,
- Lớp dán chặt và sạch. đáp ứng các yêu cầu của quy trình khử trùng bệnh viện: hơi nước, ethylene oxide hoặc formaldehyde. Mỗi sản phẩm tương thích với ISO 11607, phần 1 và 2 cũng như với phần 5 của EN868 chứng minh rằng bao bì cho thiết bị y tế tiệt trùng cuối cùng đáp ứng các yêu cầu của Châu Âu và quốc tế.
- Có các size, kích cỡ khác nhau phù hợp với các loại dụng cụ và thiết bị, vật tư tiêu hao.

Chỉ định sử dụng:

Dùng đựng các dụng cụ y tế tiệt trùng trong các bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế đảm bảo vô khuẩn các dụng cụ khám chữa bệnh, dụng cụ phẫu thuật.

Hướng dẫn sử dụng:

Trước khi cho dụng cụ vào túi hấp, phải mở đến hết 3/4 túi (đến tận mép và đáy túi)

- Đặt vật liệu xuôi theo chiều mở của túi
- Chỉ cắt túi khi đã bao trùm hết độ dài vật liệu
- Nhiệt độ niêm phong đề nghị: 150-220°C
- Đặt các túi nhựa cạnh túi nhựa, giấy cạnh giấy trong thiết bị tiệt trùng.
- Không sử dụng sản phẩm đã hết hạn hoặc bao bì bị hư hỏng.
- Không tái sử dụng sản phẩm.
- Để nơi khô thoáng, tránh ánh sáng mặt trời, bụi bẩn, ẩm ướt, tránh nhiệt độ cao. Bảo quản sai có thể dẫn đến hư hỏng sản phẩm

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Giám Đốc Điều hành



Nguyễn Quốc Tuấn