

CÔNG TY TNHH Y TẾ BÌNH MINH

ĐC: Số 117, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An

ĐT: 02383.559.555

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TT	Sản phẩm	Hướng dẫn sử dụng
1	Băng bột bó thạch cao	B1: Nhúng bột vào chậu nước sạch (nhiệt độ từ 15-30 độ C) trong vòng 1-3 giây. B2: Bóp bột nước thừa, bó theo hình xoắn chồng lên nhau vùng tổn thương, vuốt nhẹ và chỉnh khuôn sao cho phù hợp và để thạch cao đông cứng (sau khoảng 2-4 phút)
2	Băng bột bó thủy tinh	1. Dùng băng lót bọc vùng chấn thương cần bó 2. Hoặc tắt lót bọc vùng chấn thương cần bó, tạo hình cố định 3. Đi găng tay. 4. Mở bao bì sản phẩm và lấy ra khỏi túi 5. Nhúng sản phẩm vào nước sạch ở nhiệt độ phòng (25°C) trong 5-10 giây. Vắt sạch nước 6. Cuốn băng theo nhiều lớp chồng lên nhau tại vùng cần cố định hay chỉnh hình. Cuốn 3-4 lớp ở các vùng thông thường; Cuốn 5-6 lớp ở những vùng chịu lực đè của cơ thể. 7. Sau khi cuốn xong có thể chỉnh lại tư thế trong 3-5 phút. Sau đó 20 phút thì băng bó đã cố định hoàn toàn.
3	Băng thun vớ lót bó bột	1. Đo khoảng cách cần bó tùy thuộc vào vị trí bó và cắt. 2. Sử dụng tiếp băng bột bó thủy tinh.
4	Băng nẹp bột bó thủy tinh	1. Theo các phân khác nhau, chọn đúng đặc điểm kỹ thuật. 2. Mở bao bì và đưa ra các nẹp, nhúng trong nhiệt độ nước từ 4-8 giây.
5	Băng chun 2 móc, 3 móc	<ul style="list-style-type: none">• Chọn loại băng chun có kích cỡ phù hợp với vị trí cần băng bó• Trong quá trình băng bó cần nhẹ nhàng, đặt băng chun sao cho khớp với vị trí cần băng bó. Quán băng từ từ và liên tục kéo để độ co giãn giúp băng được quán chặt hơn.• Gắn chặt móc sau khi đã quán hết.
6	Băng bông lót bó bột	1. Đo khoảng cách cần bó tùy thuộc vào vị trí bó và cắt. 2. Sử dụng tiếp băng bột bó thủy tinh.

Đại diện hợp pháp của chủ cơ sở



Hoàng Xuân Quân