

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Kim lấy thuốc, bao gồm:

STT	Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Chủng loại
1	305180	Kim lấy thuốc	BD Blunt Fill Needle
2	305211	Kim lấy thuốc	BD Blunt Fill Needle with Filter

Mô tả sản phẩm:

Kim lấy thuốc là trang thiết bị y tế sử dụng một lần, dùng để lấy thuốc từ lọ và ống, không dùng để tiêm dưới da.

Cấu tạo	Nguyên liệu
Needle Hub	Polypropylene
Kim	Thép không gỉ
Nắp kim	Polypropylene
Chất bôi trơn	Silicone
Chất dính kết	Epoxy

Hạn sử dụng: 5 năm

Ứng dụng:

Kim lấy thuốc có đầu lọc dùng để lấy thuốc từ lọ và ống, không dùng để tiêm dưới da.

Hướng dẫn sử dụng/quy trình:

Để đạt kết quả tốt nhất khi sử dụng, cần:

- Gắn chặt kim vào bơm tiêm, đẩy vặn theo chiều kim đồng hồ.
Nếu kim bị cong, không được bẻ thẳng lại.
- Kéo thẳng nắp kim ra khỏi kim để tránh làm hỏng đầu kim.



THÔNG TIN AN TOÀN VỀ SẢN PHẨM

Cần trọng:

Để tránh lây nhiễm HIV (AIDS), viêm gan B và các bệnh lây nhiễm khác do bị kim đâm:

- A. Tuân thủ hướng dẫn CDC. Không đậy lại nắp kim sau khi đã sử dụng. Loại bỏ các kim không được đậy nắp và bơm tiêm vào thùng đựng vật sắc nhọn phù hợp.
- B. Nếu không làm được như trên, sử dụng kỹ thuật đậy nắp kim bằng một tay để bọc lại kim. Đảm bảo nắp bảo vệ kim được đặt đúng vị trí.

KHÔNG DÙNG LỰC ĐẨY NẮP VÀO KIM BỞI KIM CÓ THỂ ĐÂM THủng NẮP VÀ GÂY THƯƠNG TẬT.


- C. Tuân thủ theo hướng dẫn của đơn vị về xử lý vật sắc nhọn

Các sản phẩm đều được tiệt trùng, không sử dụng lại. Việc sử dụng lại có thể gây ra lây nhiễm hoặc các bệnh/thương tật khác.

Không sử dụng nếu túi bọc bị hư hỏng.

Vứt bỏ toàn bộ sản phẩm vào thùng chứa vật sắc nhọn.

VPĐD BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI TP. HCM

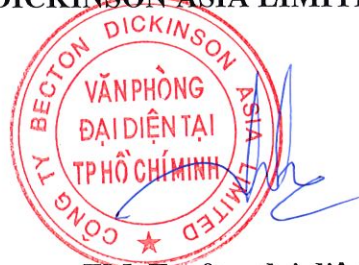

TM. Trưởng đại diện

Hồ Thị Uyên Khương

