

# CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ

4 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: 84 028 39858201 Fax: 84 028 39858202

Email: office@vietmymedical.com



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**TÊN DỤNG CỤ: TEST THỬ MÙ MÀU ISHIHARA**

**Mã số: ISH-001 ; ISH-002**

**Nhà sản xuất: Inami & Co.,Ltd, Nhật**

Mô tả chủng loại trang thiết bị y tế	Test thị lực màu Ishihara được đặt theo tên của một bác sĩ nhãn khoa người Nhật – Shinobu Ishihara (1879-1963). Bao gồm một quyển sách nhỏ, mỗi trang chứa một mẫu vẽ hình tròn (còn gọi là đĩa), trong đó chứa nhiều màu sắc với độ đậm nhạt màu sắc và kích thước khác nhau. Những chữ nhỏ có vẽ được đánh màu một cách ngẫu nhiên thật ra được sắp xếp theo một kiểu nào đó, mà người có sắc giác bình thường sẽ thấy được một số có 1 hoặc 2 chữ số xuất hiện trong những dãy chấm nhỏ đó, trong khi người mù màu không thể nhìn ra số hoặc nhìn ra một con số khác với người có sắc giác bình thường. Test thị lực màu Ishihara đầy đủ có 38 đĩa. Các phiên bản rút gọn chứa 10, 14 hoặc 24 đĩa. Hãng, nước sản xuất/ Hãng, nước chủ sở hữu gồm có: Inami & Co.,Ltd, Nhật
Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có
Mục đích/Chỉ định sử dụng như ghi trên nhóm	Bác sĩ nhãn khoa sẽ sử dụng test Ishihara để sàng lọc vấn đề mù màu ở bệnh nhân.
Hướng dẫn sử dụng	Bệnh nhân sẽ nhìn những đĩa Ishihara trong điều kiện ánh sáng bình thường khi đang đeo kính của họ. Test đòi hỏi người được sàng lọc nhận biết và xác định được con số, mục đích là nhận ra số bên trong mỗi hình tròn. Viết ra số mà bệnh nhân nhìn thấy, sau đó di chuyển đến hình tiếp theo. Nếu bệnh nhân không thể nhìn ra một số sau khoảng 5 giây, hãy viết “không có gì” sau đó di chuyển đến hình tiếp theo. Đáp án nằm ở phần dưới cùng của trang này. Ngồi cách màn hình khoảng nửa mét (2 feet), với mỗi hình tròn đặt ngang tầm mắt của bạn. Việc thực hiện test này trên màn hình máy tính nên được xử lý cẩn thận vì màn hình máy tính khác nhau có thể thay đổi đáng kể màu sắc trên các bản. Lưu ý rằng bệnh nhân có thể nhìn thấy số rõ hơn khi nhìn test này trên một màn hình khác. Ánh sáng xung quanh bạn cũng có thể tạo ra ánh sáng chói, có thể làm thay đổi màu trên các bản.
Chống chỉ định	Bác sĩ khuyên không dùng cho trẻ nhỏ.
Cảnh báo và thận trọng	Chưa xảy ra bất kỳ trường hợp rủi ro nào.
Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có

\*\*\*\*\*//\*\*\*\*\*