

Hướng Dẫn Sử Dụng

Găng tay y tế SATORY



Găng tay y tế nhãn hiệu SATORY (Latex Powdered – Có bột; Latex Powder Free – Không bột) là găng tay xuất xứ từ Thái Lan, với thành phần tiêu chuẩn theo quy định.

1. **Công dụng:**

Găng tay y tế là 1 loại găng tay bảo hộ lao động mỏng, nhẹ, dai và chuyên dụng trong lĩnh vực y tế, thực phẩm, phòng thí nghiệm, 1 số ngành công nghiệp nhẹ như sơn, công nghệ cao... Găng tay y tế có tác dụng giữ gìn vệ sinh, tránh nhiễm khuẩn từ tay đến các dụng cụ làm việc và bảo vệ tay khỏi những hoá chất, hoá học.

2. **Thành phần:**

Cao su tự nhiên Latex theo tiêu chuẩn y tế.

3. **Sử dụng:**

– Mở hộp găng tay để lấy găng ra sử dụng.

Tránh dùng các vật nhọn hoặc dao để gây hỏng, thủng găng tay.

- Mang găng tay vào cả hai bên tay (trái và phải) khi khám bệnh.
- Sau khi sử dụng, tháo găng tay bằng cách cuộn từ mặt bên trong ra ngoài để tránh tiếp xúc với bề mặt ngoài đã bị bẩn.
- Găng tay chỉ được sử dụng một lần và phải được xử lý theo quy định.

4. **Lưu ý:**

Không cần mang găng trong các chăm sóc thông thường không có nguy cơ dính máu và dịch của người bệnh.

Thay găng ngay sau mỗi thủ thuật hoặc chăm sóc cho mỗi người bệnh.

Sử dụng găng riêng cho mỗi người bệnh và phải thay găng giữa các quy trình sạch và bẩn trên cùng một bệnh nhân.

Nghiêm cấm dùng một đôi găng để khám và chăm sóc cho nhiều người bệnh; Thay găng khi găng bị rách, thủng hoặc bị châm kim.

Nghiêm cấm mang găng nghe điện thoại hoặc làm công việc hành chính, giấy tờ.



Găng sau khi sử dụng đã dính máu, dịch cơ thể hoặc các chất tiết phải hủy bỏ như chất thải y tế nguy hại.

Sau khi tháo găng phải rửa tay ngay.

5. Bảo quản:

Nên bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

Tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn xạ nhiệt

Tránh nơi có côn trùng và các chất gây kích ứng.

6. Khuyến cáo:

Đây là sản phẩm làm từ cao su tự nhiên có thể gây dị ứng da.

Ngưng sử dụng ngay lập tức khi xuất hiện triệu chứng nổi mẩn đỏ, ngứa rát da.

