

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỐNG ĐUNG MÁU

MODEL : ESR Tube (8 x 120mm – 1,28mL)  
EDTA K2 Tube (13 x 75mm – 2mL)  
EDTA K2 Tube (13 x 75mm – 2mL)  
PT Tube (13 x 75mm – 2mL)  
GLUCOSE Tube (13 x 75mm – 2mL)

## Cách sử dụng như sau:

- 1/ bật mờ nắp ống
- 2/ lấy máu đúng thể tích máu theo vạch chỉ định trên ống hoặc sử dụng pipette để lấy máu
- 3/ đậy nắp và thực hiện lắc ống mẫu từ 5- 10 lần
- 5/ đưa ống mẫu vào vị trí đo mẫu trên máy
- 6/ đợi kết quả trên màn hình hoặc in ra ngoài
- 7/ cuối ngày vệ sinh máy và tắt máy

## CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG MÁY VÀ LÀM XÉT NGHIỆM

### 1. Khi bật, tắt máy:

- Khi mất điện cần phải tắt máy ngay, đến khi bắt đầu có điện nên để nguồn điện ổn định từ 3 đến 5 phút ta mới bật máy. Nên dùng ổn áp để có điện áp ổn định.
- Chú ý không bật máy luôn sau khi vừa tắt máy. Sau ít nhất 30 giây để máy ổn định mới bật. Nếu bật, tắt đột ngột có thể gây cháy cầu chì và sẽ dẫn đến hỏng các bộ phận khác của máy.