

## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

**Sản phẩm: Nhiệt kế điện tử**

**1. Giới thiệu sản phẩm:** Nhiệt kế điện tử sử dụng để đo nhiệt độ cơ thể.

**2. Hướng dẫn sử dụng:**

**1. Đo trán :**

- *Bước 1:* Ấn nút 1 giây để khởi động nhiệt kế , quá trình khởi động kết thúc khi nhiệt kế phát ra 2 tiếng bip.

- *Bước 2:* Tiến hành đo : Đặt nhiệt kế lên thái dương bấm và giữ nút đo trán đi một đường từ thái dương bên này sang thái dương bên kia để có nhiệt độ chính xác nhất sau đó thả tay, khi đó nhiệt kế phát ra một tiếng bip báo hiệu quá trình đo kết thúc.

\* Đèn xanh sẽ hiển thị nếu ở mức nhiệt độ bình thường (dưới 38°C/100.4°F) nhiệt độ cao hơn bình thường (38°C/100.4°F) sẽ báo đèn đỏ.

**2. Đo tai:**

- *Bước 1:* Gỡ bỏ nắp bảo vệ của nhiệt kế

- *Bước 2:* Khởi động nhiệt kế tương tự đo trán

- *Bước 3:* Đưa nhiệt kế vào tai cần đo theo chiều của màng nhĩ sau đó bấm nút đo, quá trình đo kết thúc khi nhiệt kế phát ra 1 tiếng bip.

\* Đèn xanh sẽ hiển thị nếu nhiệt độ bình thường (dưới 38°C/100.4°F), nhiệt độ cao hơn bình thường (38°C/100.4°F) sẽ báo đèn đỏ.

**3. Đo nhiệt độ môi trường, đồ vật:**

- Để đo được nhiệt độ môi trường cần chuyển đổi nhiệt kế về chế độ đo môi trường, khi đó nhiệt kế sẽ báo biểu tượng.

- Cách chuyển đổi như sau : Bấm nút để bật nhiệt kế sau đó bấm đồng thời (bấm cùng lúc) nút và nút giữ khoảng 3 giây, quá trình chuyển đổi kết thúc khi nhiệt kế phát ra 1 tiếng bip. Để chuyển về chế độ đo tai hoặc trán lặp lại thao tác trên. Sử dụng nút đo trán hoặc đo tai để đo nhiệt độ môi trường hoặc bề mặt.

**4. Đo nách, trán, hậu môn:**

- *Bước 1.* Ấn phím bật/tắt.

- *Bước 2.* Đặt nhiệt kế vào vị trí cần đo. Ở miệng, nách hoặc hậu môn.

- *Bước 3.* Khi kết quả hiển thị, nhiệt kế phát ra tiếng “bíp – bíp – bíp” 3 lần. Lấy nhiệt kế ra và đọc kết quả.

Vị trí đo miệng, nách, hậu môn: Thời gian đo 80 giây, 120 giây, 60 giây.

**Đại diện hợp pháp của chủ cơ sở**



**Hoàng Xuân Quân**