



**CÔNG TY TNHH TM-DVKT HOÀNG LỘC**

48 Long Hưng, phường 07, q.Tân Bình, Tp.HCM

Hoang Loc Đt/Fax: 08 3971 6873/ 6874/ 3583

Tp.HCM, ngày 17 tháng 9 năm 2018

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên trang thiết bị y tế: Dụng cụ banh, bẫy sử dụng nhiều lần  
Tên cơ sở sản xuất: SCHREIBER GmbH  
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Unterer Damm 15, 78567 Fridingen, Đức

- Dụng cụ phẫu thuật làm bằng thép không gỉ chuẩn y tế, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao trước khi sử dụng.
- Vệ sinh dụng cụ: theo từng chuẩn mực riêng của bệnh viện về loại dung dịch khử khuẩn, thời gian khử khuẩn, ngâm dụng cụ trong thùng đựng dung dịch khử khuẩn khoảng 5-10 phút hoặc tùy bệnh viện yêu cầu
  - Dùng bàn chải cọ rửa đánh kỹ các khe kẽ của từng dụng cụ.
  - Vật mũi nhọn, sắc bén: đánh cọ rửa theo 1 chiều để tránh làm mòn dụng cụ.
  - Tráng rửa dụng cụ bằng nước sạch.
  - Lau khô dụng cụ bằng khăn sạch ngay sau khi tráng rửa.
- Đựng dụng cụ đã lau khô vào hộp đựng chuyên dụng hoặc vào khăn gói dụng cụ, dán băng chỉ thị màu, dán nhãn ghi ngày xử lý, hạn dùng và tên người xử lý, đặt dụng cụ trong thiết bị lưu giữ.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Giám Đốc



Cao Xuân Quỳnh Anh

