

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### GIƯỜNG BỆNH NHÂN

Model: TB-2003

Hãng SX: Taedong – Hàn Quốc

Tên các bộ phận:



No.	Tên	Thông số	
1	Bảng đầu giường ABS	490*450*35mm	có thể tháo rời, vệ sinh
2	Bảng chân giường ABS	như trên	như trên
3	Thanh giường bên, có thể gấp lại	trái&phải 355mm*1160mm PVC, SUS & CS steel	bảo vệ khỏi tĩnh điện
4	Bảng điều khiển y tá	Từ hãng Taedong	có thể điều chỉnh Lung& Chân Cao & Thấp
5	Khung giường	Tấm và ống thép 2.3mm	
6	Tấm mặt giường	Phần lưng: 790*815 Phần chỗ ngồi: 250*815 Phần chân: 370*815 Phần khớp gối: 440*815	
7	Thiết bị cầm tay	Thiết bị cầm tay	có thể điều chỉnh Lung& Chân Cao& Thấp

8	Bộ truyền động điện	250mm, 200mm, 100mm	
9	Phanh hãm	Khuôn ép nhựa ABS	Cây truyền dịch IV & nhiệt kế
10	Khung giường dưới	Ống CS & phủ lớp sơn phun	
11	Bánh xe	Khóa bánh xe 5"	
12	Bàn ăn	Khuôn ép nhựa ABS	

No.	Tên bộ phận	Số part.	
1	Bộ truyền động cho lưng	JCB35B-6N-200	24V DC 6000N
2	Bộ truyền động cho khớp gối	JCB35B-6N-150	24V DC 6000N
3	Bộ truyền động	JC35C-8N-250	24V DC 8000N
4	Hộp điều khiển	JCB35C-03-24	220-230V 50-60Hz
5	Bảng điều khiển y tá	Taedong	Điều khiển
6	Thiết bị cảm tay	JCHV35-3	Lưng, Gối, Cao&Thấp
7	Dây cáp	Y cable-J	Kết nối

### Hướng dẫn hoạt động:

- Kiểm tra nếu có bất kỳ chướng ngại nào trên hoặc dưới giường trước khi hoạt động Bảng điều khiển & cảm tay hay không.
- Lắp ráp mặt giường, bàn ăn, bảng đầu giường & chân giường
- Kiểm tra chức năng của các thanh giường bên
- Kiểm tra chức năng hoạt động của bàn ăn
- Kiểm tra bánh xe, on/off
- Cài đặt cây treo dịch truyền IV
- Kiểm tra nguồn điện 220~230V và 50-60Hz và kết nối phích cắm đến nguồn điện
- Cài đặt thiết bị cảm tay trên thanh giường bên hoặc bảng đầu giường và hoạt động công tắc
- Hoạt động Bảng điều khiển và công tắc



GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Nguyệt Ánh*



→ Back Rest  
→ High&Low  
→ Knee Rest

- ① Push the push Switch All the time during operate the switch
- ② Back Rest
- ③ Knee Rest
- ④ High & Low