

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG

Phòng 501, nhà 2, 67B Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Thiết bị: BẢNG THỬ THỊ LỰC

Chủng loại: VAC-02

Hãng/ Nước sản xuất: Shanghai Link Precision Instruments Co./ Trung Quốc

Thông số kỹ thuật:

Bảng thử thị lực hiển thị Optotype đơn giản và dòng đơn

Bao gồm cả biểu đồ loạn thị, thanh màu đỏ / xanh lục.

Tất cả các bộ phận chức năng được chiếu sáng cùng một lúc.

Được điều khiển bằng điều khiển từ xa không dây hoặc bằng tay.

Khoảng cách kiểm tra: 5 mét.

Kích thước: 85cm × 28,3cm × 1,8cm

Cấu hình:

- Máy chính
- Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo, bao gồm:
 - Dây nguồn
 - Điều khiển từ xa
 - Sách hướng dẫn sử dụng
 - Bộ vật tư lắp đặt
 - Thẻ khóa

Hướng dẫn sử dụng:

1. Bật đèn
2. Đưa bệnh nhân ngồi ngay ngắn với khoảng cách phù hợp tới bảng thử thị lực
3. Chọn biểu đồ cho Bệnh nhân quan sát các biểu tượng từ lớn đến nhỏ
4. Thử lại với kết quả cuối cùng
5. Ghi kết quả

(Tham khảo hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Anh kèm theo)