

I. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 40:2018/Dolex
- Trang thiết bị y tế loại A

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Công dụng:

- Bảo vệ vùng kín, ngăn ngừa các bệnh phụ khoa.
- Tinh chất lá trà không, lô hội giúp ngăn ngừa mùi hôi khó chịu, duy trì độ ẩm tự nhiên cho âm đạo.
- Chiết xuất cúc la mã giúp trẻ hóa vùng da vùng kín, mang lại cảm giác êm ái, mịn màng cho vùng da nhạy cảm.

Chỉ định:

Sử dụng sản phẩm trong các trường hợp:

- Vệ sinh hàng ngày làm sạch, khử mùi hôi, mang lại cảm giác dễ chịu sau khi sử dụng. Ngăn ngừa nhiễm khuẩn, ngăn ngừa các nguy cơ nhiễm và mắc các bệnh phụ khoa.
- Vệ sinh trong chu kỳ kinh nguyệt, hậu sản.

Cách sử dụng:

Làm ướt vùng kín, lấy 2-3 ml dung dịch vào lòng bàn tay, thoa rửa nhẹ vùng kín trong 1 phút, sau đó rửa lại thật kỹ bằng nước sạch.

Nên sử dụng hàng ngày. Khi bị viêm nhiễm và các bệnh phụ khoa nên vệ sinh 2-3 lần/ngày

Chống Chỉ định: Dị ứng với bất kỳ thành phần nào của dung dịch.

Lưu ý: Sản phẩm được bào chế từ các thành phần tự nhiên, an toàn, thích hợp sử dụng cho mọi lứa tuổi.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ DOLEXP HAR

Địa chỉ: Lô C2, KCN Đại An, Thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương.