

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**  
**BÀN KHÁM SÀN**  
**MODEL: JS-005-1. HÃNG SẢN XUẤT: JINSOL MEDICAL - KOREA**

**I. Đặc Điểm**

- Công tắc chân điều khiển từ xa dạng có dây và không dây
- Thiết kế tiện lợi – an toàn.
- Nhiều phụ kiện khác nhau
- Nút định vị trí 1 chạm
- Dễ dàng di chuyển với con lăn



**GIÁM ĐỐC**  
*Ấu Văn Sơn*

**II. Kết cấu**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Tên sản phẩm        | Bàn khám sản khoa                          |
| Tên model           | JS-005-1                                   |
| Phạm vi sử dụng     | Sản khoa, phụ khoa                         |
| Kích thước tổng thể | Dài x rộng x cao : 1270x680x510~1030 (mm ) |
| Phần trên bàn       | Dài x rộng : 1270 x 680 ( mm )             |
| Phần lưng           | -5~70 độ                                   |
| Phần hông           | 0~30 độ                                    |
| Nguồn điện          | AC110V 50/60HZ                             |
| Công suất tiêu thụ  | 300W                                       |
| Cầu chì             | 250V 5A                                    |
| Trọng lượng thực    | 140kg                                      |

Phụ kiện tiêu chuẩn:

- |                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 1. Bộ đỡ phần tay:            | 1 bộ  |
| 2. Cái đỡ vai:                | 1 bộ  |
| 3. Đỡ đầu gối:                | 1 bộ  |
| 4. Khung che                  | 1 cái |
| 5. Nệm:                       | 1 bộ  |
| 6. Công tắc đạp chân wereless | 1 cái |
| 7. khay đựng nước thải:       | 1 cái |

**III. Cách sử dụng:**

1. Mở nguồn
2. Sử dụng công tắc chân theo cách sau:

Nút AUTO Điều chỉnh tới vị trí đã lưu bằng việc bấm nút Auto 1 lần

Nút BASE Điều chỉnh bàn tới vị trí BASE mong muốn giữa 510mm đến 1030mm bằng việc bật và giữ nút BASE

Nút SEAT Điều chỉnh bàn tới vị trí SEAT mong muốn giữa khoảng 0 độ đến 30 độ bằng việc giữ nút SEAT

Nút BACK Điều chỉnh bàn tới vị trí BACK mong muốn giữa khoảng -5 độ đến 70 độ bằng việc giữ nút BACK