

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HỘ DỤNG CỤ BẢO VỆ
TỔ CHỨC ĐẦU GẦN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quý Khải

Hà Nội - 2017



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỤNG CỤ BẢO VỆ TỔ CHỨC ĐẦU GÀN - SIGN

- Tháo rời nếu có thể.
- Chuẩn bị dung dịch làm sạch, ở nồng độ, nhiệt độ thích hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
- Ngâm hoàn toàn dụng cụ trong dung dịch làm sạch khoảng 20 phút.
- Chà rửa dụng cụ bằng bàn chải lông to mềm trong khoảng 3 phút.
- Ngâm dụng cụ trong nước đã khử ion trong ít nhất 3 phút.
- Lau khô dụng cụ.
- Toàn bộ dụng cụ trước khi sử dụng phải được vô trùng. Có thể bằng các cách sau:
 - Hấp chân không ở 270 độ F trong 4 phút, cho phép làm khô trong 30 phút.
 - Hoặc hấp chân không ở nhiệt độ từ 273 độ F đến 279 độ F, làm khô trong 16 phút.
 - Đối với nồi hấp trọng lực chuyển đổi ở nhiệt độ 250 độ F trong 30 phút, làm khô trong 45 phút.
- Cấu hình nồi hấp tiệt trùng phải đảm bảo tuân theo tiêu chuẩn AORN.
- Sau đó bộ dụng cụ sẵn sàng sử dụng cho ca mổ theo chỉ định của bác sĩ phẫu thuật.
- Không sử dụng bàn chải cứng, kim loại để chà rửa dụng cụ.
- Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh có chứa iod, clo hoặc muối kim loại, nồng độ PH cao trên 11.
- Nếu chi tiết dụng cụ có dấu hiệu hỏng cần loại bỏ và thay thế.
- Nhân viên liên quan sử dụng dụng cụ cần được hướng dẫn, đào tạo và có chuyên môn.

