


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY KÉO GIÃN CỘT SỐNG RXPC-400D / RXPC – 500D

Sơ đồ bàn phím:

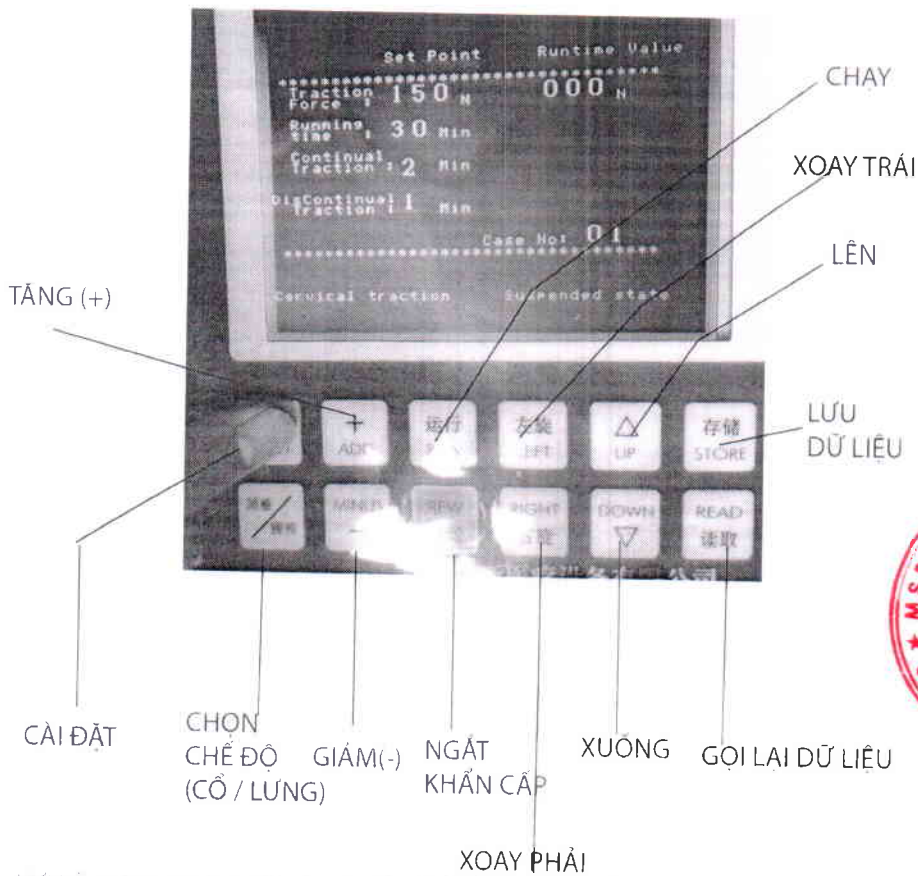

LƯU Ý: RXPC 500D mới có nút XOAY PHẢI, XOAY TRÁI để vận sườn.  
 Nút LÊN, XUỐNG dùng để kéo bàn di chuyển dọc lên hoặc xuống

Các bước sử dụng máy:

Bước 1: Đặt bệnh nhân vào đúng tư thế

Bước 2: Chọn chế độ(cổ hoặc lưng) Chế độ kéo cổ là CERVICAL

TRACTION, lưng là LUMBAR TRACTION

Bước 3: Vào "reset" để cài đặt lực, thời gian chạy, thời gian nghỉ bằng các nút "reset", "add", "minus"

Trong đó:

- Traction force: Lực kéo tối đa của máy
- Running time: Thời gian chạy chương trình
- Continual traction: Thời gian kéo liên tục
- Discontinual traction: Thời gian nghỉ
- Left Angel – Right Angel: Góc xoay trái, phải

Bước 4: Các nút "up" "down" là để nâng hạ phần đầu (dùng cho chương trình cột sống)

Bước 5: Chọn “ RUN” để chạy chương trình

\*Lưu ý:

*STORE dùng khi chỉnh xong các thông số và muốn lưu lại, ấn STORE, chọn lưu là 1,2... rồi ấn STORE*

*READ là khi muốn lấy lại thông số đã lưu, ấn READ, chọn 1,2... rồi ấn READ*

