



CÔNG TY TNHH TMDV XDSX TÂN HƯNG THỊNH
Số 5, Đường số 25, Khu Phố 06, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TPHCM.
Điện thoại: 08 62539495 Fax: 08 62539496
Email: tht@thtmed.com, tanhungthinhmedical@gmail.com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG CELLDIFF-3+
Mã sản phẩm: CELLDIF3

Hãng sản xuất: Fortress Diagnostics Limited

Địa chỉ: Unit 2C, Antrim Technology Park, Belfast Road, Antrim, Northern Ireland, BT41 1QS, United Kingdom.

Bước 1:

- Chuẩn bị đầy đủ, kiểm tra dây điện nguồn. Bật công tắc nguồn phía sau lưng máy → Máy sẽ tự động kiểm tra các điều kiện trong khoảng 3-5 phút.
- + Nếu không có lỗi máy sẽ về chế độ Ready.
- + Nếu có lỗi máy sẽ báo tiếng buyp → Nhấp vào lỗi trên màn hình → Chọn “Clear” để xóa lỗi. Nếu lỗi vẫn xuất hiện → nhấp 2 lần vào lỗi và làm theo hướng dẫn để khắc phục lỗi. Nếu vẫn còn lỗi thì liên hệ với kỹ sư để tìm cách khắc phục.

Bước 2: Chạy mẫu:

- Từ Menu màn hình chính chọn “**Sample Info**” → điền đầy đủ thông tin bệnh nhân → chọn chế độ “**whole blood**” (không pha loãng), đưa mẫu bệnh nhân vào → Nhấn nút → Chờ kim hút mẫu đưa lên thì lấy mẫu bệnh nhân ra. Máy sẽ tự động phân tích và cho ra kết quả.

- Thể tích hút mẫu: 6 μ L.

- Chú ý: Nếu muốn chạy chế độ pha loãng → Chọn chế độ “**Prediluted**” Máy sẽ tự động pha loãng mẫu với tỉ lệ 1:36 (20 μ L mẫu, 0.7mL “**Diluent**”), cách chạy cũng giống như chạy mẫu bình thường.

Bước 4: Xem lại kết quả trong máy.

- **Xem lại kết quả trong máy:** Từ Menu màn hình chính chọn “**Count**” → Chọn mục “**List**” (Bên dưới màn hình).



CÔNG TY TNHH TMDV XDSX TÂN HƯNG THỊNH
Số 5, Đường số 25, Khu Phố 06, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TPHCM.
Điện thoại: 08 62539495 Fax: 08 62539496
Email: tht@thtmed.com, tanhungthinhmedical@gmail.com

Bước 5: In kết quả.

- **Cài đặt máy in:** Từ Menu màn hình chính chọn **“Print”**.

+ Nếu muốn máy tự động in thì chọn mục **“ On”** còn không thì chọn **“ Off”**.

+ Nếu muốn in kết quả bằng máy in của máy (mặc định) Chọn **“ Inner printer”** hoặc muốn in kết quả với máy in ngoài thì chọn **“ Outer printer”**

+ Nếu muốn chọn chiều in ngang thì chọn **“ Horizontal”** hoặc chiều in dọc (mặc định) chọn **“ Vertical”**.

+ **In kết quả bệnh nhân.**

Từ Menu màn hình chính chọn **“Print”**(Góc dưới màn hình) → chọn mục đầu tiên → máy sẽ tự động in kết quả theo như phần đã cài đặt.

Bước 6: Rửa máy.

- Rửa máy cuối ngày: Từ Menu màn hình chính chọn **Service** → **Rinse** → Máy sẽ tự động rửa.

Bước 7: Tắt máy.

Từ Menu màn hình chính chọn **Shutdown** → Ok.

* Cách thay bình thuốc mới: Khi hết bình thuốc máy sẽ hiện ra màn hình. Lấy bình thuốc cũ đã hết ra, đưa bình mới vào. Sau đó từ Menu màn hình chính chọn **Service** → **replace** → **Chọn bình thuốc muốn thay thế** → máy sẽ tự động nhận bình thuốc mới.

CÔNG TY TNHH TMDV XDSX TÂN HƯNG THỊNH

