



**CÔNG TY TNHH TMDV XDSX TÂN HƯNG THỊNH**  
Số 5, Đường số 25, Khu Phố 06, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TPHCM.  
Điện thoại: 08 62539495 Fax: 08 62539496  
Email: tht@thtmed.com, tanhungthinhmedical@gmail.com

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MÁY PHÂN TÍCH MIỄN  
DỊCH TỰ ĐỘNG CLIA 1200  
Mã sản phẩm: CLIA1200**

**Hãng sản xuất:** Fortress Diagnostics Limited

**Địa chỉ:** Unit 2C, Antrim Technology Park, Belfast Road, Antrim,  
Northern Ireland, BT41 1QS, United Kingdom.

**Bước 1:** Kiểm tra nước rửa, hóa chất, nước cất trên máy.

**Bước 2:** Khởi động CPU. Mở phần mềm sau đó mở máy CLIA 1200

- Sau đó chọn **Online** → chờ máy trở về chế độ **Stand-by**.

**I. Check thuốc.**

- Kiểm tra thuốc trên màn hình hóa chất
- Vào **Reagent** → chọn **Reagent horizontal**, để kiểm tra thể tích thuốc.

**II. Chạy mẫu.**

- Vào **Sample** → nhập **Sample No** → chọn vị trí để mẫu (Pos) → chọn test cần chạy (bảng Item info) → chọn **Register sample** → chọn **Patient info** để nhập thông tin bệnh nhân → chọn **Register patient** → chọn **Start test** máy bắt đầu phân tích mẫu (lưu ý đặt mẫu đúng vị trí cài).
- Xem kết quả chạy mẫu: vào **Test Result**. Nếu muốn in kết quả, vào **Preview** để in.

**III. Chạy Calib.**

- Chuẩn bị type blank và calip để vào vị trí đã cài.
- Để chạy calib vào **Calibration** → chọn **Calibration register** → chọn **Calibration type** (2 point calibration) → chọn **Test calib** trong bảng **Test item** → chọn **Register test** → chọn **Calib test** để bắt đầu chạy calib
- Xem kết quả chạy calib vào **Calibration result**

**Chạy rửa cuối ngày.**

- Từ **Maintenance** → chọn **Rinsing** → start .

**CÔNG TY TNHH TMDV XDSX TÂN HƯNG THỊNH**

