



CÔNG TY TNHH TMDV XDSX TÂN HƯNG THỊNH
Số 5, Đường số 25, Khu Phố 06, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TPHCM.
Điện thoại: 08 62539495 Fax: 08 62539496
Email: tht@thtmed.com, tanhungthinhmedical@gmail.com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MÁY Ủ ELISA

IS-A29

Mã sản phẩm: FORISA29

Hãng sản xuất: Fortress Diagnostics Limited

**Địa chỉ: Unit 2C, Antrim Technology Park, Belfast Road, Antrim,
Northern Ireland, BT41 1QS, United Kingdom.**

Bước 1: Kiểm tra dây điện nguồn, bật công tắc nguồn.

Bước 2: - Chọn nhiệt độ cần ủ (30 hoặc 37 độ) và thời gian cần ủ

- Cho bệnh phẩm vào mâm ủ
→ nhấn start để bắt đầu ủ. Khi hết thời gian ủ máy sẽ kêu tiếng píp → lấy bệnh phẩm ra.

CÔNG TY TNHH TMDV XDSX TÂN HƯNG THỊNH

