

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### MIẾNG DÁN AIKIDO

#### Đặc điểm:

Miếng dán hình chữ nhật, KT : 5 cm x 10 cm. Độ dính tốt, dịu êm khi dán, không đau khi gỡ bỏ. Không chứa hoạt chất thuốc, an toàn khi dùng với thuốc. Hiệu quả mát lạnh trong 10 giờ.

#### Công dụng :

Chườm mát nơi dán trong trường hợp bị nóng sốt, say nắng, đau răng đau cơ.

**Thành phần :** Hydrogel (polymer), Arabic gum, nước tinh khiết.

#### Cách sử dụng :

Gỡ miếng phim ra khỏi miếng dán, dán mặt dính lên vùng da sạch và khô, nơi muốn làm mát như trán, vai, lưng, cơ bắp. Có thể cắt miếng dán theo kích cỡ nơi dán. Mỗi lần dán từ 1-2 miếng. Gỡ bỏ sau 10 giờ sử dụng. Mỗi miếng dán chỉ dùng một lần. Dùng được cho trẻ sơ sinh. Để nâng cao hiệu quả làm mát, để nguyên gói vào tủ lạnh trước khi dùng, không để vào ngăn làm đá.

#### Lưu ý :

- Không dán lên mắt, niêm mạc, vùng da bị tổn thương.
- Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Nếu trẻ sốt kéo dài, hãy đưa trẻ đến bác sỹ.

**Bảo quản :** Để nơi khô mát, tránh ánh nắng.

**Hạn dùng :** 03 năm từ ngày sản xuất.

**Đóng gói :** Gói 2 miếng.

**Nhà sản xuất :** Caleb Pharmaceutical, Inc. Taiwan

4F.No.1200, Sec 3, Fuguo Rd, Luzhu Dist, Taoyuan City 338, Taoyuan 338,

Taiwan (R.O.C)

**Nhập khẩu và phân phối :** Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân ( Tatra )

M1-17 đô thị Trung Hòa Nhân chính, p.Trung Hòa, q.Cầu Giấy, tp. Hà nội.

