

230mm

115mm

95mm

MIẾNG DÁN CHườM LẠNH

**Aikido**  
Tatra

2 SHEETS FOR CHILDREN

**Aikido** COOL - PATCH

LÀM MÁT LẠNH - DỊU NGAY CƠM NÓNG SỐT

- Dịu êm khi dán • An toàn khi dùng với thuốc
- Không có hoạt chất thuốc • Không đau khi gỡ bỏ
- Độ dính tốt • Hiệu quả mát lạnh 10 tiếng



**Công dụng** : Chườm mát nơi dán trong trường hợp bị nóng sốt, say nắng, đau răng, đau cơ.

**Thành phần** : Hydrogel, Arabic gum, Purified water.

**Cách sử dụng** :

Gỡ miếng film ra khỏi miếng dán, dán mặt dính lên vùng da sạch và khô nơi muốn làm mát như trán, vai, lưng, cơ bắp. Có thể cắt miếng dán theo kích cỡ nơi dán. Mỗi lần dán từ 1 đến 2 miếng. Gỡ bỏ sau 10 giờ sử dụng. Mỗi miếng chỉ dùng một lần. Dùng được cho trẻ sơ sinh.

Để nâng cao hiệu quả làm mát, để nguyên gói vào tủ lạnh trước khi dùng không để vào ngăn làm đá.

**Lưu ý** : Không dán lên mắt, niêm mạc, vùng da bị tổn thương.

**Bảo quản** : Để nơi khô mát, tránh ánh nắng

**Hạn dùng** : 3 năm từ ngày sản xuất.

**Đóng gói** : Gói 2 miếng.

SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC- KHÔNG THAY THẾ THUỐC  
NẾU TRẺ SỐT KÉO DÀI-HÃY ĐƯA TRẺ ĐẾN BỆNH VIỆN

**Caleb**

Sản xuất bởi: Caleb Pharmaceuticals, Inc  
No.1200, Sec. 3, Fuguo Rd., Luzhu Township, Taoyuan, Taiwan.

Phân phối bởi: Công ty TNHH Dược phẩm Tatra  
M1-17 Đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu giấy, Tp. Hà nội

LOT NO :  
EXP :




404181

FOR INSTANT COOLING SENSATION  
SOOTHES FEVER DISCOMFORT

10 HOURS  
COOLING EFFECT

10

REDUCE HOT

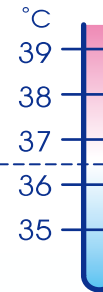

Fever



Toothache



Headache



Muscle pain

165mm

