



## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên trang thiết bị y tế : **Đầu ra khí y tế**

+ **Bước 1** : Định vị vị trí đầu ra khí chờ của đầu cắm thiết bị khí y tế

+ **Bước 2** : Sau khi định vị được vị trí khí chờ, tiến hành lắp đầu ra khí y tế lên tường đúng vị trí của từng loại khí được qui định theo màu sắc và hình dạng để phân biệt.

+ **Bước 3** : Sau khi lắp vào tường phải tiến kiểm tra các đầu đầu khí , không lắp lẫn được ổ cắm, Kiểm tra van khóa tự động, kỹ thuật khớp nối nhanh.

Đầu khí được thiết kế hai cấp kín, trong trường hợp cấp thứ nhất được tháo ra bảo dưỡng hay sửa chữa thì cấp thứ 2 vẫn là kín hệ thống, không gây rò rỉ.



CTY TNHH TTNT **Mộc Thành Văn**  
2/1/27 Bình Giã, F. 13, Q. Tân Bình  
ĐT: 08.22159392 – Fax: 08.38126637  
Email: mothan@mothan.vn  
Hotline: 0918.057.847