



CÔNG TY TNHH NTI VINA

33 VSIP II đường số 7, Khu Công Nghiệp Việt Nam –
Singapore II, P. Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nhóm khăn và bộ khăn sử dụng một lần

Nhóm khăn và bộ khăn được sử dụng trong các ca phẫu thuật tổng quát, các ca phẫu thuật mắt, các ca thông tim mạch vành, các ca sinh sản, các ca phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, các ca phẫu thuật đầu, phụ khoa hay tiết niệu, ... Tùy vào số lượng và thành phần các phụ kiện sẽ đi kèm theo và có các hướng dẫn sử dụng khác nhau, cụ thể là:

1. Nhóm khăn và bộ khăn tổng quát:

- Mở lớp giấy bao bì.
- Trải khăn bàn dụng cụ và khăn trải bàn Mayo (nếu có)
- Cố định các khăn chính phủ xung quanh vùng phẫu trường và trải dài trên người bệnh nhân.
- Ngoài ra trong bộ sản phẩm còn có:
 - Khăn đa dụng: khăn này sử dụng linh hoạt
 - Băng keo OP: dùng để cố định ống dây, kim tiêm.
 - Túi đựng: dùng để đựng dụng cụ kim chỉ cho thao tác nhanh và đảm bảo an toàn vùng tiệt trùng.
 - Khăn thấm: dùng để lau tay trước khi đeo găng tay hoặc thấm Betadine ở vùng phẫu trường.
 - Mànng phẫu thuật: dùng để vô trùng vùng phẫu trường.
 - Áo phẫu thuật: bảo vệ phẫu thuật viên.
- Sau khi đã hoàn tất các ca phẫu thuật thì bỏ các vật dụng vào khu vực rác y tế.

2. Nhóm khăn và bộ khăn nhãn khoa:

- Mở lớp giấy bao bì.
- Trải khăn bàn dụng cụ và khăn trải bàn Mayo (nếu có)
- Cố định khăn mắt lên chỗ cần mổ bằng mànng phẫu thuật và trải dài khăn lên người bệnh nhân.
 - Phụ kiện chuyên dụng: chỉ sử dụng 1 lần, tùy theo nhu cầu bác sĩ yêu cầu được thêm vào hay không.
 - Áo phẫu thuật: bảo vệ phẫu thuật viên.



- Sau khi đã hoàn tất các ca phẫu thuật thì bỏ các vật dụng vào khu vực rác y tế.

3. Nhóm khăn và bộ khăn tim mạch:

- Mở lớp giấy bao bì.
- Trải khăn bàn dụng cụ và khăn trải bàn Mayo (nếu có)
- Cố định khăn chụp mạch vành bằng màng phẫu thuật trên hai bên đùi và tay (nếu có) và trải dài trên người bệnh nhân.
- Bao chụp đầu đèn: bao phủ đầu đèn trong phòng mổ
- Bao kính chắn chì: bao phủ kính chắn chì trong phòng mổ
- Ngoài ra trong bộ sản phẩm còn có:
 - Khăn đa dụng: sử dụng linh hoạt
 - Túi đựng: dùng để đựng dụng cụ kim chỉ cho thao tác nhanh và đảm bảo an toàn vùng tiết trùng.
 - Khăn thấm: dùng để lau tay trước khi đeo găng tay hoặc thấm Betadine ở vùng phẫu trường.
 - Phụ kiện chuyên dụng: chỉ sử dụng 1 lần, tùy theo nhu cầu bác sĩ yêu cầu được thêm vào hay không.
 - Áo phẫu thuật: bảo vệ phẫu thuật viên.
- Sau khi đã hoàn tất các ca phẫu thuật thì bỏ các vật dụng vào khu vực rác y tế.

4. Nhóm khăn và bộ khăn phẫu thuật đầu:

- Mở lớp giấy bao bì.
- Trải khăn bàn dụng cụ và khăn trải bàn Mayo (nếu có)
- Cố định khăn chỉnh hình lên vùng phẫu trường và trải dài trên người bệnh nhân.
- Ngoài ra trong bộ sản phẩm còn có:
 - Băng keo OP: dùng để cố định ống dây, kim tiêm.
 - Khăn thấm: dùng để lau tay trước khi đeo găng tay hoặc thấm Betadine ở vùng phẫu trường.
 - Áo phẫu thuật: bảo vệ phẫu thuật viên.
- Sau khi đã hoàn tất các ca phẫu thuật thì bỏ các vật dụng vào khu vực rác y tế.

5. Nhóm khăn và bộ khăn tiết niệu – phụ khoa:

- Mở lớp giấy bao bì.
- Trải khăn bàn dụng cụ và khăn trải bàn Mayo (nếu có)



- Cố định khăn chính trên vùng phẫu trường và trải dài trên người bệnh nhân.
- Ngoài ra trong bộ sản phẩm còn có:
 - Băng keo OP: dùng để cố định ống dây, kim tiêm.
 - Áo phẫu thuật: bảo vệ phẫu thuật viên.
 - Phụ kiện chuyên dụng: chỉ sử dụng 1 lần, tùy theo nhu cầu bác sĩ yêu cầu được thêm vào hay không.
 - Khăn thấm: dùng để lau tay trước khi đeo găng tay hoặc thấm Betadine ở vùng phẫu trường.
- Sau khi đã hoàn tất các ca phẫu thuật thì bỏ các vật dụng vào khu vực rác y tế.

6. Nhóm khăn và bộ khăn sản khoa:

- Mở lớp giấy bao bì.
- Trải khăn bàn dụng cụ và khăn trải bàn Mayo (nếu có)
- Cố định khăn bằng màng phẫu thuật trên vùng phẫu trường và trải dài trên người bệnh nhân.
- Khăn thấm: dùng để lau tay trước khi đeo găng tay hoặc thấm Betadine ở vùng phẫu trường.
- Khăn em bé: dùng để lót nôi sau khi sinh
- Ngoài ra trong bộ sản phẩm còn có:
 - Phụ kiện chuyên dụng: chỉ sử dụng 1 lần, tùy theo nhu cầu bác sĩ yêu cầu được thêm vào hay không.
 - Băng keo OP: dùng để cố định ống dây, kim tiêm.
 - Màng phẫu thuật: dùng để vô trùng vùng phẫu trường.
 - Áo phẫu thuật: bảo vệ phẫu thuật viên.
- Sau khi đã hoàn tất các ca phẫu thuật thì bỏ các vật dụng vào khu vực rác y tế.



**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ
PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT**

**CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN
NTI VINA**

(Handwritten signature)

Lâm Dương Lâm Ni



CÔNG TY TNHH NTI VINA
33 VSIP II đường số 7, Khu Công Nghiệp Việt Nam –
Singapore II, P. Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nhóm áo phẫu thuật dùng một lần

Sản phẩm được làm bằng vải không dệt, không cho vi khuẩn xuyên qua, chống thấm nước, còn, chống tĩnh điện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả phẫu thuật viên và cho bệnh nhân, Cách gấp áo theo nguyên tắc kiểm soát nhiễm khuẩn, giúp thao tác mặc áo của phẫu thuật viên nhanh chóng và an toàn.

Màng gia cố áo được làm bằng màng plastic màu, không thấm nước, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khẩu trang được tích hợp trên sản phẩm, thuận tiện hơn cho phẫu thuật viên.

Công dụng: Bảo vệ phẫu thuật viên và bệnh nhân.

Hướng dẫn sử dụng:

- Kiểm tra bao bì sản phẩm không bị lủng, rách.
- Mở bao bì sản phẩm.
- Mặc áo theo các thao tác sau:
 - Bước 1: Mở bao bì và giầy gói áo. Lau khô tay bằng 2 khăn thấm. Luồn 2 tay vào bên trong hai cánh của áo phẫu thuật.
 - Bước 2: Giữ áo thật chắc. Bung áo ra và luồn tay vào cánh tay áo.
 - Bước 3: Người phụ tá luồn 2 tay vào bên trong áo và kéo lên. Sau đó, cột hai dây áo phía sau lại. Cài gai dán cho áo thật ngay ngắn.
 - Bước 4: Phẫu thuật viên mang găng tay phẫu thuật rồi rút một dây áo ở phía trước bụng, phần còn lại đưa cho người phụ tá. Người phụ tá cầm miếng carton cái dây áo đưa về phía phẫu thuật viên, phẫu thuật viên rút dây áo còn lại và cột chặt chúng lại với nhau.

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ
PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT**



Lim Dương Lâm Ni



CÔNG TY TNHH NTI VINA

33 VSIP II đường số 7, Khu Công Nghiệp Việt Nam –
Singapore II, P. Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nhóm phụ kiện y tế dùng một lần

Nhóm phụ kiện y tế dùng 1 lần bao gồm các nhóm nhỏ như bao chụp đầu đèn, bao phủ chỉ, túi dụng cụ, khẩu trang, màng phẫu thuật, nón, giấy gói, khăn trải bàn dụng cụ, bao đựng remote, với các thành phần được liệt kê như sau:

- Bao chụp đầu đèn: Màng phim PE trong không thấm chất lỏng, không thấm cồn...
- Túi chứa dịch: với chất liệu plastic trong, không thấm nước được tích hợp băng keo lên túi, thuận tiện cho bác sĩ dán lên khăn với từng mục đích khác nhau.
- Màng phẫu thuật: dùng để dán lên người bệnh nhân, tại phẫu trường cần mổ làm tăng khả năng vô trùng tốt hơn, không gây kích ứng da.
- Vải gói dụng cụ: được làm bằng vải không dệt, chống tĩnh điện, không thấm nước, có thể tiệt trùng bằng hơi nước.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ
PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT



Lim Dương Lâm Ni