



Hướng dẫn sử dụng

ByeBye-FEVER for Children

Hướng dẫn sử dụng

- Gỡ bỏ miếng phim và dán mặt dính trực tiếp lên da.
- Miếng dán có độ dính tốt, phù hợp với da và được giữ cố định trên da.
- Đặt miếng dán vào tủ lạnh trước khi sử dụng để tăng hiệu quả làm mát. Không bảo quản trong tủ đá.

Lưu ý

- Chỉ dùng ngoài da. Không sử dụng trên vùng da bị tổn thương, chàm, nổi mụn, vùng da trên mắt hay quanh mắt, niêm mạc.
- Ngưng sử dụng và hỏi ý kiến Bác sĩ nếu da bị kích ứng, nổi mụn nước, ứng đỏ, ngứa hay rát. Đối với da nhạy cảm, nên hỏi ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ trước khi sử dụng.
- Phải có sự giám sát của cha mẹ hay người lớn khi sử dụng miếng dán cho trẻ em hoặc cho người gặp khó khăn trong việc tự sử dụng.
- Không phủ miếng dán lên miệng hoặc mũi.
- Miếng dán có thể khó dính chắc vào da khi có mồ hôi, hoặc đang sử dụng bột phấn, kem dưỡng da hay các sản phẩm tương tự. Trong trường hợp này, nên rửa sạch và lau khô da trước khi dán.
- Hiệu quả làm mát của miếng dán giảm dần sau khi mở bao. Sử dụng miếng dán ngay sau khi mở bao.
- Chỉ sử dụng miếng dán một lần để đạt hiệu quả cao và vệ sinh.

Điều kiện bảo quản

- Bảo quản miếng dán trong bao và gấp miếng bao lại hai lần.
- Bảo quản nơi mát, khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp.
- Để xa tầm tay trẻ em

Khác

- Sản phẩm không phải là thuốc. Nếu sốt kéo dài, phải liên hệ ngay với Bác sĩ.